

医療用品(4) 整形用品
 一般医療機器 カテーテル被覆・保護材(救急絆創膏)
 JMDNコード 70444000(34864000)

ユーテープ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

本品の形状・構造は下記の通りである。

[平面図]

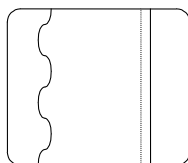

[断面図]

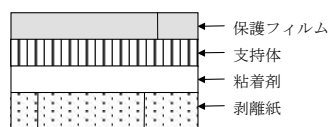

部品名	原材料名	摘要
保護フィルム	ポリプロピレンフィルム	—
支持体	ポリエーテル・ポリアミドブロック共重合樹脂フィルム	—
粘着剤	アクリル系粘着剤	※
剥離紙	シリコン処理ポリエチレンラミネート紙	—

※：患者の健常皮膚又は創傷面に接触する部材

【使用目的、効能又は効果】

1. カテーテル固定用途
 注射針又はカテーテル刺入部位に直接貼付して、その固定に用いる。
2. 救急絆創膏用途
 傷の被覆及び保護、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【品目仕様等】

無菌性保証水準(SAL)： 10^{-6}

【操作方法又は使用方法等】

(貼付方法)

- 1) 剥離紙の波形の切れ込みの所を折り曲げて、剥離紙の広い方をミシン目の所まではがす。
- 2) 粘着面を適用部位にあてて、しわにならないようにはりつけ、剥離紙の狭い方を取り去る。
- 3) 剥離紙の残った部分を押さえ、保護フィルムの広い方をはぎ取る。
- 4) 残った剥離紙を取り去り、最後に保護フィルムの狭い方をはぎ取る。

(除去方法)

周囲の皮膚を軽く押さえながら、端から静かに剥がし取る。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 本品使用中に皮膚障害と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
2. その他の注意
 - 1) 本品は滅菌済みで、包装の破損等がない限り無菌性は保証されているが、使用時に包装が破損または汚損している場合には使用しないこと。
 - 2) 本品は開封後、直ちに使用すること。
 - 3) 本品を再滅菌しないこと。
 - 4) 本品を貼付する前に適用部位を十分に消毒すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法 室温保存
 有効期間 被包に表示(自己認証データによる)

【包装】

製品番号	サイズ	入数/箱
No. 6	6cm×6.5cm	50枚
No. 12	10cm×12cm	30枚
No. 18	15cm×18cm	10枚

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

発売元：祐徳薬品工業株式会社
 〒849-1393 佐賀県鹿島市大字納富分 2596 番地 1
 TEL 0954-63-1231 (代)

製造販売元：日東電工株式会社
 〒108-0075 東京都港区港南 1-2-70
 TEL 03-6632-2013

製造元：日東電工株式会社