

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

※※2009年8月1日改訂（第7版）

届出番号 41B2X00001000007

※2008年9月1日改訂（第6版）

医療用品 4 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000

ブラッドバン。


再使用禁止

【禁忌・禁止】

一度使ったものは再使用しないでください。

※※【形状・構造及び原理等】

本品は、アクリル系粘着剤を塗布したアセテート粘着テープとポリオレフィンネット付き不織布パッドからなる救急絆創膏です。

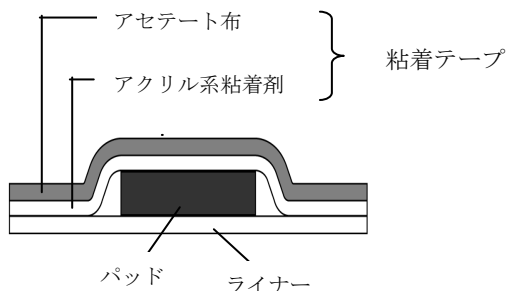

【使用目的、効能又は効果】

注射・採血・点滴・関節穿刺等の穿刺部及び創面の保護

【品目仕様等】

エチレンオキシドガス滅菌済み。

【操作方法又は使用方法等】

1. 貼付部位を清潔にして使用してください。
2. ライナーより本品を剥がし、穿刺部にパッドをあて、貼付してください。
3. 貼付後、しばらくの間貼付部位を軽く押さえてください。

※※【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

本品の使用により発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は、使用を中止し、適切な処置を行ってください。

2. その他の注意

- 1) 滅菌袋に破損、汚損、水濡れなどがみられるものは使用しないでください。
- 2) 使用中、上から水などで濡らすことは避けてください。
- 3) 使用中、汚れたり濡れたりした場合は、新しいものと貼りかえてください。
- 4) 使用中、背面に血液や滲出液などのにじみがみられた場合は、新しいものと貼りかえてください。
- 5) 剥がす時は、皮膚を傷めないようゆっくり剥がしてください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 1) 直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
- 2) 幼児の手の届かない所に保管してください。

2. 使用期限

使用期限は外箱に記載〔自己認証（当社データ）による〕

※【包装】

	全体サイズ (パッドサイズ)	入数 (回/箱)
Sサイズ	20mm×20mm (8mm×8mm)	500 1000
Mサイズ	27mm×27mm (13mm×13mm)	500

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：⊕ 祐徳薬品工業株式会社

住 所：〒849-1393

佐賀県鹿島市大字納富分 2596 番地 1

T E L：0954-63-1231(代)

製造業者：⊕ 祐徳薬品工業株式会社