

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

※※2017年10月改訂(第8版)(新記載要領に基づく改訂)

届出番号 41B2X00001000007

※2009年8月改訂(第7版)

医療用品 4 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000

ブラッドバン®

再使用禁止


※※【禁忌・禁止】

再使用禁止

※【形状・構造及び原理等】

本品は、アクリル系粘着剤を塗布したアセテート粘着テープとポリオレフィンネット付き不織布パッドからなる救急絆創膏です。

本品は、エチレンオキシドガス滅菌済みです。

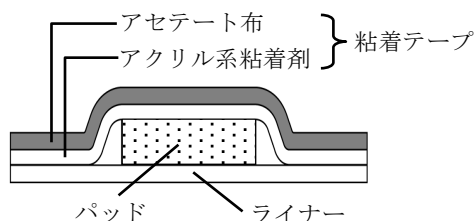

	全体サイズ (パッドサイズ)
Sサイズ	20mm×20mm (8mm×8mm)
Mサイズ	27mm×27mm (13mm×13mm)

※※【使用目的又は効果】

注射・採血・点滴・関節穿刺等の穿刺部及び創面の保護

※※【使用方法等】

1. 貼付部位を清潔にして使用してください。
2. ライナーより本品を剥がし、穿刺部にパッドをあて、貼付してください。
3. 貼付後、しばらくの間貼付部位を軽く押さえてください。

※【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

本品の使用により発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は、使用を中止し、適切な処置を行ってください。

2. その他の注意

- 1) 滅菌袋に破損、汚損、水濡れなどがみられるものは使用しないでください。
- 2) 使用中、上から水などで濡らすことは避けてください。
- 3) 使用中、汚れたり濡れたりした場合は、新しいものと貼りかえてください。
- 4) 使用中、背面に血液や滲出液などのにじみがみられた場合は、新しいものと貼りかえてください。
- 5) 剥がす時は、皮膚を傷めないようゆっくり剥がしてください。

※※【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光をさけて、室温で保管してください。

2. 有効期間

5年(自己認証による)

使用期限は外箱に記載

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：☎ 祐徳薬品工業株式会社

[お問合せ窓口]

祐徳薬品工業株式会社 お客様相談窓口

〒849-1393 佐賀県鹿島市大字納富分 2596 番地 1

TEL 0954-63-1320

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日は除く)

「ブラッドバン」は祐徳薬品工業㈱の登録商標です。