

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

※2017年10月改訂(第3版)(新記載要領に基づく改訂)

届出番号 41B2X00001000013

2015年9月改訂(第2版)

医療用品 4 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000

## 防水カットバン® D


### 再使用禁止

#### ※【禁忌・禁止】

再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

本品は、アクリル系粘着剤を塗布した塩化ビニル粘着テープとベンザルコニウム塩化物薬液で消毒したポリオレフィンネット付き不織布パッドからなる救急絆創膏です。

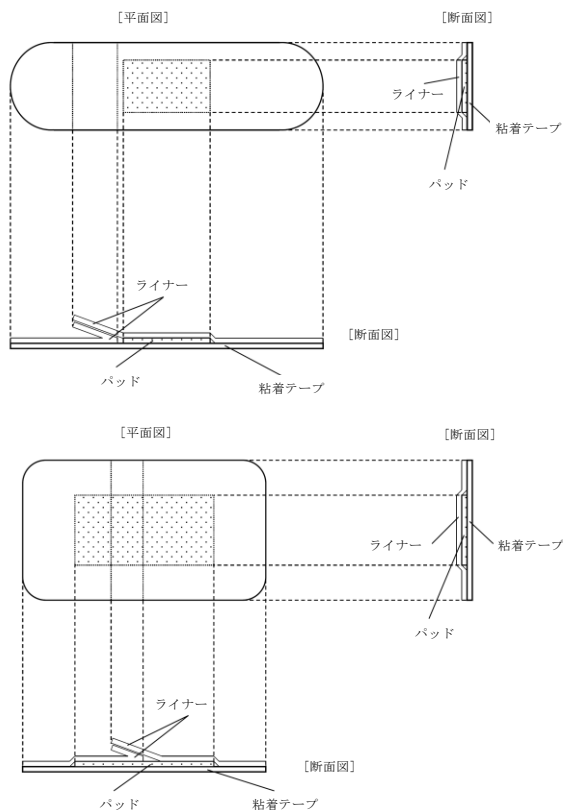

	全体サイズ (パッドサイズ)
ノーマルサイズ	25mm×72mm (13mm×24mm)
ジャンボサイズ	60mm×85mm (30mm×55mm)

#### ※【使用目的又は効果】

創傷面の保護

#### ※【使用方法等】

患部を清潔にして、パッドが患部にあたるようにはってください。

防水性を高めるため、パッドの周りをしっかり押さえてよく密着させてください。

#### ※【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

本品の使用により発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

##### 2. その他の注意

- 1)パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、はり替えてください。
- 2)患部を清潔にし、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。
- 3)粘着面を患部にはらないでください。

#### ※【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

- 1)直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
- 2)小児の手の届かない所に保管してください。

##### 2. 有効期間

5年(自己認証による)  
使用期限は外箱に記載

#### ※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：⊕祐徳薬品工業株式会社

【お問合せ窓口】

祐徳薬品工業株式会社 お客様相談窓口

〒849-1393 佐賀県鹿島市大字納富分 2596 番地 1

TEL 0954-63-1320

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日は除く)

「カットバン」は祐徳薬品工業㈱の登録商標です。