

機械器具 62 歯科用切削器
一般医療機器 歯科用スケーラ JMDN 35320000

マイルド・スケーラー

【禁忌・禁止】

1. 目的以外の使用の禁止: 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
2. 改造の禁止: 形態変更や改造等はしないこと。
3. 異常時の使用禁止: 本製品に劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
4. 注意事項の厳守: 本製品の正しい使用のために、使用上の注意を必ず守ること。

【形状・構造及び原理等】

<外観>



型番: 4R/4L、H6/H7、204/S

【使用目的、効能又は効果】

口腔内清掃及び歯周治療時に歯の表面から歯石等の沈着物を除去するために用いる。

【品目仕様等】

規格及び試験方法

	規格	試験方法
外観試験	本品の包装に、著しいキズ、使用上差支えを生じるような欠点がないこと。	目視検査を行う。

【操作方法又は使用方法等】

1. 手に持って、歯の表面や歯根、補綴物の歯石等の沈着物をかき出すように除去する。
2. 使用後は滅菌を施し保管する。
滅菌条件(例):
オートクレーブ 135℃ 15分(乾燥工程不可)。
乾熱滅菌不可。

○使用例

想定される各種使用例は以下のとおり。

型番	使用例
4R/4L	インプラント等補綴物表面の沈着物除去。
H6/H7	歯肉縁上の沈着物除去。
204/S	歯肉縁上 遠心面の沈着物の除去。

【使用上の注意】

1. 作業部に破損、ヒビ、キズがないか確認すること。これらがあった場合は、使用しないこと。
2. 作業部は、シャープニングを行うこと。
3. 洗浄、消毒の注意:
 - ・消毒薬を使用しないこと。
 - ・フェノール類の薬品を使用しないこと。
 - ・超音波洗浄器の洗浄槽にひたさないこと。
 - ・高濃度の消毒薬の中に入れていないこと。

- ・樹脂 100%の滅菌バッグを使用しないこと。紙/フィルムを組み合わせた滅菌バッグの場合、紙の部分を下にして使用すること。
4. 磨き粉、金属ウール、金ブラシの使用禁止: 洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金ブラシを使用しないこと。
 5. 取扱いについて: 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管上の注意: 常温常湿で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

滅菌方法: オートクレーブ、ケミクレーブ

使用前・使用後の点検: 使用前・使用後は、作業部に破損、ヒビ、キズがないか確認すること。これらがあった場合は、使用しないこと。

【包装】

3本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者及びお問い合わせ先

株式会社吉田製作所

住所 : 〒130-8516

東京都墨田区江東橋1-3-6

TEL : 03-3631-2191(代表)

FAX : 03-3633-9427(代表)

お問い合わせ先

TEL : 03-3631-2204(特殊機器事業部)

FAX : 03-3635-1060(特殊機器事業部)

外国製造所: 蘇州パックデントテクノロジー社

【Suzhou Pac-Dent Technology Co., Ltd.】

中華人民共和国

販売業者

クロスフィールド株式会社

住所 : 〒130-8516

東京都墨田区江東橋1-3-6

TEL : 03-5625-3306

FAX : 03-3635-1060

文書番号 FF 添 075-001