

化膿を防ぐ  
ウェットタイプの  
殺菌消毒パッド

**リバガーゼF**

使用前にこの説明文書を必ず読むこと

【指定医薬部外品】

**※してはいけないこと**

**△使用上の注意**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の人は使用しないこと(1)患部が広範囲の人(2)深い傷やひどいやけどの人

**■相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
皮膚：発疹・発赤、かゆみ3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**【効能・効果】** 切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒・被覆  
**【用法・用量】** アルミ袋を開封し、中のガーゼをピンセットで取り出し、つやのある面(フィルム面)を傷口にあて、添付の固定用粘着シートで被覆固定してください。薬剤が特殊加工フィルムを透過して傷を消毒し、ガーゼと傷の固着も防ぎます。又、創傷面を消毒する際にはガーゼ面(つやのない面)で清拭してください。創傷面が特に小さい場合には適宜折りたたむか、又は裁断の上使用してください。

**用法及び用量に関連する注意**(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること。(3)外用にのみ使用すること。(4)固定用粘着シートの貼付部位に発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には、固定用粘着シートの使用を中止し、包帯等の方法で固定すること。(5)固定用粘着シートの粘着面を直接患部に貼らないこと。(6)ガーゼについている透明なフィルムは、はがさずにそのまま使用すること。(7)固定用粘着シートに薬液がしみ出すことがあるので、そのような場合は上から包帯を巻くなど、衣服を汚さないように注意すること。(8)患部を清潔にし、ガーゼ部分を汚さないように注意して使用すること。

**【成分・分量】**

本品1包(1.8g)中  
アクリノール水和物0.2%液…1.5g  
基布(4×5cm)…0.3g  
添加物 濃グリセリン

**【内容品】**

薬液含浸ガーゼ 12枚  
固定用粘着シート 12枚  
ピンセット 1個

**【保管及び取扱い上の注意】**

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。  
(2)小児の手の届かない所に保管すること。  
(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)

玉川衛材(株)お客様相談窓口

TEL.03-3861-2037  
受付時間 10:00～17:00  
(土・日・祝日を除く)

<https://www.tamagawa-eizai.co.jp>

**タマガワ  
エーザイ**

製造販売元  
玉川衛材株式会社  
東京都千代田区岩本町2-2-16

HE-GP-N

**リバガーゼF**  
化膿を防ぐウェットタイプの殺菌消毒パッド  
12包  
【指定医薬部外品】

【指定医薬部外品】

特殊加工フィルム付き薬液含浸ガーゼ  
**リバガーゼF**  
傷口にくっつかない特殊フィルム使用®  
化膿を防ぐウェットタイプの殺菌消毒パッド



ガーゼ  
50mm×40mm  
固定用粘着シート  
82mm×70mm

手が汚れないピンセット付 固定用粘着シート入り

殺菌消毒液を特殊ガーゼに含ませ、1枚ずつアルミ袋で包装しました。 **12包**

**【ご注意】**

通気性の良い固定用粘着シートを使用しているため、薬液がしみだしてくるおそれがありますので、じかに衣類等が触れないようご注意ください。

万一、薬液が付着した場合は、すぐに付着した生地の下にガーゼ又はタオル等をあて、酢を浸した脱脂綿等で付着部分を上から繰り返したたいてください。

その後、酸素系漂白剤の使用できる衣類等については、液体の酸素系漂白剤を付着した部分に塗布して漂白してください。

紙 外箱

結束テープ  
固定用粘着シート袋



使用  
期限  
製造  
番号

4 901957 020089