

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

# スマイルコンタクトファインフィットプラス

コンタクトレンズ装着液

第3類医薬品

レンズ装着時、直接1~3滴つけるだけ  
ゴロゴロ感を抑え、瞳にスツとなじんで、レンズ装着を容易にする  
瞳への親和性を高める[コンドロイチン硫酸ナトリウム]配合

—スマイルコンタクトファインフィットプラスの特徴—

全ての  
コンタクトレンズに  
使えます。

① 全てのコンタクトレンズでスムーズな装着が実現

3種の高分子クッション成分の働きで、レンズのゴロゴロ感や異物感を軽減し、装着を容易にします。


② 瞳になじみやすく、  
優れた装着感を表現

瞳への親和性を高める高分子  
(コンドロイチン硫酸ナトリウム) 配合

③ 「高保水性高分子」が  
レンズの乾燥を防止

④ タンパク汚れを抑え、  
レンズのくもりを防止

レンズと瞳の間の  
クッション作用

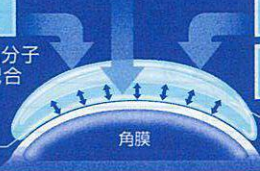

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4) 次の症状のある人。…はげしい目の痛み
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

## ● 効能

ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズの装着を容易にします

## ● 用法・用量

コンタクトレンズの両面を本剤1~3滴でぬらしたのち装着してください



※装着後、液が目から溢れた場合には、清潔なガーゼなどで軽く拭き取ってください。  
成分の結晶が目周りに付着することがあります。

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をコンタクトレンズや指に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因になります。)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 本剤を用いてコンタクトレンズを装着した後に、点眼薬を使用する場合は、30分以上あけてご使用ください。

## ● 成分(100mL中)

有効成分	含量
ヒプロメロース	1.0g
ポリビニルアルコール(部分けん化物)	2.0g
コンドロイチン硫酸ナトリウム	0.05g
L-アスパラギン酸カリウム	0.1g
タウリン	1.0g

\*添加物として、トロメタモール、エデト酸Na、シクロデキストリン、塩化ベンザルコニウム、ポリソルベート80、グリセリン、pH調整剤を含む。

## ● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 開封後、容器の保管状態によっては、成分の結晶が容器の先やふちに白くつくことがあります。その場合には、清潔なガーゼなどで軽く拭き取ってください。
- (6) 使用期限(外箱にかいてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。

[コンタクトレンズご使用の際の注意] \*コンタクトレンズを取り扱う前に、よく手を洗い清潔にしてください。

\*コンタクトレンズを清潔に、また、正常に保つために保存、洗浄については十分に心がけてください。

\*コンタクトレンズご使用の方は、眼科医による定期検査を必ずお受けください。

お問い合わせ先

ライオン株式会社 お客様相談室

☎(03)3621-6100

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7