

指定医薬部外品

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

REPAIR BANDAGE

RE・BAN ウェットバン

消毒薬アクリノール液含有パッド

- 【特長】
- ・ウェット状態の消毒薬アクリノール液含有パッド付き絆創膏です。
 - ・「消毒薬」と「絆創膏」が一体化しているので、キズの手当てが簡単に出来ます。
 - ・一枚ずつ個別包装されているので、持ち運びに便利です。

【禁忌・禁止】 一度使用したものは再使用しないでください。

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書(又は箱)を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

成分・分量

パッド100g中にアクリノール水和物625mgを含有
本品一枚あたり

サイズ	アクリノール0.2%液	パッド
S	125mg	40mg
M	500mg	160mg
L	750mg	240mg


添加物：濃グリセリン

効能・効果

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、
創傷面の消毒・保護(被覆)

用法・用量

アルミ袋を開封し、粘着シートのセパレーター(剥離紙)をはがし、
パッドを傷口にあて貼り付けてください。

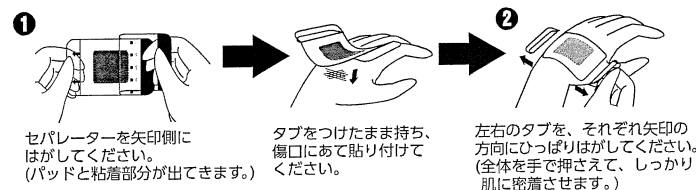

用法・用量に関する注意

- (1) 上記の図に示す様にセパレーター(剥離紙)をはがして使用してください。
- (2) 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意して使用してください。
- (3) 粘着面を患部に貼らないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。
- (5) 粘着シートはシワにならないように注意してお貼りください。シワが入ると、防水性が損なわれたり、薬液がもれる恐れがあります。
- (6) 薬液の色は薬効成分アクリノールの黄色です。ご使用後、貼ったところが黄色くなりますが、自然に消滅します。ただし、薬液が衣服に付きますと落としにくいのでご注意ください。
- (7) パッド中の薬液が目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (8) 汗や水分があると、皮膚との粘着性が弱くなりはがれやすくなりますのでご注意ください。
- (9) 1日1回貼りかえてください。
- (10) 使用期限が過ぎたもの、および使用前に開封された形跡のあるものは使用しないでください。
- (11) 外用にのみ使用してください。

保管及び取り扱い上の注意

- ・直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- ・小児の手の届かない所に保管してください。
- ・アルミ袋から出した状態で保管しないでください。
- ・アルミの個包装内に水滴が付着することがありますが、効能・効果には変わりはありませんので、安心してお使いください。
(通気性の良い粘着シートを使用しているため薬液中の水分が水蒸気となって個包装内に付着することがあります。)

玉川衛材(株)お客様相談窓口

TEL 03-3861-2037

受付時間:平日9:00-17:00(土・日・祝を除く)

製造販売元

タマガワ
玉川衛材株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-2-16

ホームページ

<http://www.tamagawa-eizai.co.jp>



YL-O-KY