

アコマYコネクタ

【警告】

使用上の注意

- (1) 有資格者以外は使用しないこと。裁断
- (2) 漏れがないように、確実に接続すること。
- (3) 使用中は閉塞を起こさないよう常に監視すること。
[重篤な有害事象を生ずる可能性がある]

【禁忌・禁止】

併用医療機器


- 以下の製品とは併用しないこと。
- ・ 確実な接続状態を維持できないもの
 - ・ 接続により閉塞を起こすもの
 - ・ 離脱が困難なもの

使用方法

- (1) 分解や改造をしないこと。
- (2) 摩耗・劣化（クラック）したものは使用しないこと。
- (3) 接続口には、絆創膏などのテープ類を巻きつけないこと。

**【形状・構造及び原理等】

形状

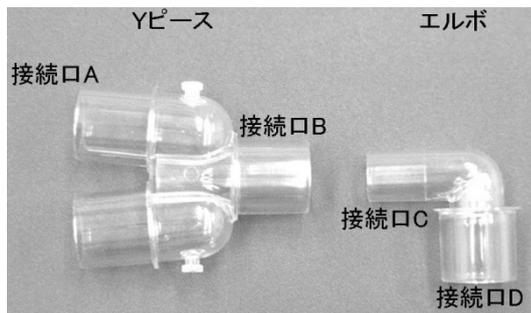

Yピース

品名	材質	接続口A	接続口B
アコマYコネクタYピースPS	ポリサルフォン	22M	22M/15F
アコマYコネクタYピースPC	ポリカーボネート		

エルボ

品名	材質	接続口A	接続口B
アコマYコネクタエルボPS	ポリサルフォン	15M	22M/15F
アコマYコネクタエルボPC	ポリカーボネート		

原理

Yピースは、呼吸器からの吸気ガスを呼吸回路用蛇管の継がれた接続口Aから接続口Bに継がれたエルボへ流す。また逆方向に患者の呼気ガスを呼吸器側へ流す。エルボは、Yピースを経由し呼吸器からの吸気ガスを患者へ流す。また患者からの呼気ガスを、Yピースを経由し呼吸器側へ流す。

**【使用目的又は効果】

使用目的

呼吸回路と気管内チューブ、フェースマスク、他の呼吸回路のコンポーネントを接続するために使用する。

**【使用方法等】

使用方法

- (1) Yピースの接続口Aに、それぞれ呼気側蛇管と吸気側蛇管を接続する。
- (2) Yピースの接続口Bにエルボの接続口Cを接続する。
- (3) エルボの接続口Dに、マスクや患者に挿管された気管内チューブなどを接続する。

【使用上の注意】

使用方法

- (1) 安全確保のため、使用前に点検をする。
- (2) 異常時には速やかに使用を中止する。
- (3) 乾燥した状態で接続する。
- (4) 漏れ試験をしてから患者に接続する。
- (5) オートクレープ滅菌を繰り返すことにより、接続口の嵌合が変わるので、著しい変化を認めた場合は交換する。
- (6) Yピースとエルボが嵌まり込んで外れない場合、専用器具を用いて外す。

**【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- (1) 室温下で保管する。
- (2) 水のかからない場所に保管する。
- (3) 気圧、温度、風通し、直射日光（紫外線）、殺菌灯、ほこり、塩分、イオウ分等を含んだ空気により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管する。
- (4) 重みで破損しないように配慮して保管する。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- (1) 洗浄／消毒／滅菌
 - 1) 薬液などでの洗浄は、製品の破損につながるのではない。
 - 2) 液体に浸すような洗浄はしない。
 - 3) EOG 滅菌が可能。
 - 4) オートクレープ滅菌は、以下の条件で可能。
 - a) ポリサルフォン製品
121°Cで15分以上、あるいは134°Cで5分以上
 - b) ポリカーボネート製品
121°Cで15分以上
・乾燥等の工程時に、滅菌装置庫内の温度が指定滅菌温度以上になる場合があるので、使用する滅菌装置の取扱説明書等で安全を確認する。
 - 5) 有機溶剤で洗浄／消毒は、アルコール類以外使用しない。
- (2) 処分方法
処分する場合は、医療廃棄物として廃棄する。
(自治体の定める方法に従い、安全に処理をする)

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者の名称

アコマ医科工業株式会社

電話番号

03-3811-4151（緊急時も同様）

<https://www.acoma.com>