

機械器具(13) 聴診器
一般医療機器 胎児用聴診器 32659000

樋口式産科聴診器

【警告】


<使用方法>

- 1) 一患者ごとに消毒を行なうこと。
[感染のおそれがある。]
- 2) 本品を使用後に取り扱う際は、必ず手袋を着用するなどの感染対策に努めること。
[感染のおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品はトランペット型中空管からなり、全体が一体で構成されている。

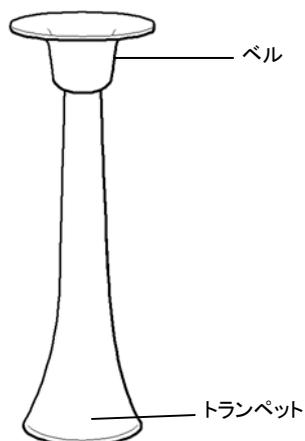

2. 材質

硬質木材

*3. 作動原理

本品は、胎児心音を聴くために用いる機械式の聴取装置である。本品のトランペット側を聴診部に当て、中空管を経て伝達・拡大した胎児心音をベル側で聴診する。

【使用目的又は効果】

本品は、胎児の心音を聴くために用いる機械式の聴取装置である。本品はトランペット型中空管からなり、胎児心音は中空管の気道を経て伝達される。

*【使用方法等】

本品のトランペット側を聴診部に、ベル側を耳にそれぞれ当て、胎児心音を聴診する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 過度の力を加えたり、無理な使用はしないこと。
[本品の損傷の原因になる。]
- 2) 火に近づけたり、熱のあるものに当てないこと。
[本品の損傷の原因になる。]
- 3) 本品に傷や破損がないことを確認してから使用すること。
[聴診部に傷をつけたり、聴診音が聴き取りにくくなる原因になる。]
- 4) 器具に異常がある場合や破損している場合は「使用禁止」と明示し、使用しないこと。
- 5) 長時間続けて使用すると耳を傷めるおそれがあるため注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

耐用期間:6年[自己認証データによる]
清拭後は清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

【使用者による保守点検事項】

- 1) 清拭
本品に汚れがある場合は、清潔な布や綿棒等を使って汚れを落とすこと。
感染防止のため、一患者ごとに消毒液で湿した布等で全体を清拭すること。
一日に一度は清拭し、よく乾燥させること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

アトムメディカル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1
TEL: 048-853-3661(大代表) FAX:048-853-0304(代表)