

機械器具 47 注射針及び穿刺針  
一般医療機器 通気針 70199000

## ロングエアー針


### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

<本品の基本構成>

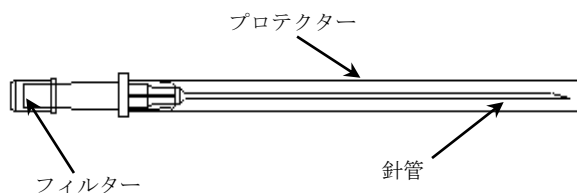

#### 【使用目的又は効果】

- 本品は、通常、輸液瓶等から輸液する際、瓶内に通気されるために使用する針をいう。チューブ及びフィルタ付きもある。
- 本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

#### 【使用方法等】

1. 本品は1回限りの使い捨て製品(ディスポーザブル)であって再使用しないこと。
2. このロングエアー針は、献血ヴェノグロブリン IH、献血アルブミン「ベネシス」、ハプトグロビン「ベネシス」、ノイアート用として専用に設計されたものです。
3. 献血ヴェノグロブリン IH、献血アルブミン「ベネシス」、ハプトグロビン「ベネシス」、ノイアートを点滴静注する際に、バイアルの排出口を下にして、フィルター部を指で蓋をした状態のまま、まっすぐいっばいの深さまで突き刺し、ロングエアー針の先端が液面上に出たことを確認してから、指を放して使用する。

#### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ロングエアー針の針管部には直接手を触れないこと。
- プロテクターを外すとき、針先がプロテクターに触れないように注意すること。(プロテクターが針に触れると刃先が変形し、穿刺しづらくなる場合がある。)
- ロングエアー針をバイアルのゴム栓に穿刺する場合は、ロングエアー針をなるべく刺通面に垂直に刺し、同一部位に穿刺されることが無いように使用すること。

#### 【使用上の注意】

##### [重要な基本的注意]

- 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。
- 使用後は誤刺に注意し、プロテクターを針にまっすぐにかぶせること。(傾けてかぶせると、針がプロテクターを突き抜けることがある。)

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### [保管方法]

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

##### [有効期間・使用期限]

包装(ラベル)に使用期限を表示している。[自己認証による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### [製造販売業者]

フォルテグロウメディカル株式会社

電話番号 0283-22-2801