一般医療機器 医 03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70977000

セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィット パウダーフリー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある 医療関係者の使用及び患者への使用は禁止

【形状・構造及び原理等】

- ●天然ゴムラテックス製パウダーフリー アレルギーの原因の一つであるプロテインを極力抑えた手 に優しいパウダーフリータイプ
- ●使い捨てタイプ
- ●左右兼用、未滅菌
- ●XXS、XS、S、M、Lの5サイズ



【品目仕様等】

●老化前:引張強さ 18Mpa 以上

切断時伸び 650%以上

●老化後:引張強さ 14Mpa 以上

切断時伸び 500%以上

【使用目的又は効果】

検査・検診、感染保護用として医療施設等において用いる 天然ゴム手袋である。

【使用方法等】

箱を開封して、グローブを取り出し装着する。

【使用上の注意】

- 1. 使用注意
- ●天然ゴムは、痒み、発疹、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、 血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こす ことがあります。このような症状を起こした場合には直ちに 使用を中止し、適切な処置を施してください。
- ●天然ゴムと接触する機会の多い方々は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意してください。

2. 重要な基本的注意

●包装が破損していたり、汚損していた場合には、使用しないでください。

製造販売届出番号: 28B3X00001000062

- ●刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますのでご注意ください。
- ●包装を開封したらすぐに使用してください。

3. 相互作用

●薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合がありますので確認の上、使用してください。

【保管方法及び使用期間等】

- 1. 保管方法
- ●水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温多湿、埃、塩分、 硫黄分を含んだ空気等による悪影響の生じる恐れのない場所 に保管してください。
- ●化学薬品の保管場所やオゾンなどのガスの発生しやすい場所 に保管しないでください。
- 2. 有効期間
- ●上記条件の下で製造後5年間(製造元データによる) 使用の期限は包装箱に記載する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 製造販売元

A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド 〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通 1-2-10 読売神戸ビル 9F TEL078-327-2333

外国製造所国名: マレーシア