

機械器具(25)医療用鏡  
管理医療機器 人工開口向け内視鏡用くもり止め (70177000)

## エンドゼロクリア S

### 再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 形状・構造

本品は内視鏡の結露防止剤で、本品とスポンジで構成されている。



##### 2. 原材料

エンドゼロクリア(本品)

: エタノール、アクリル共重合物

スポンジ

: ABS樹脂、ウレタン

##### 3. 原理

本品を人工開口部から挿入する内視鏡レンズ面に塗布することにより、内視鏡と体内の温度差により生じる結露を防止する。本品は液体である。

本品の原材料であるアクリル共重合物は親水性ユニットと疎水性ユニットから構成されており、疎水性ユニットは内視鏡レンズ面に吸着する役目、親水性ユニットは表面に水膜を形成する役目をそれぞれ持っている。すなわち基本的な原理は親水性界面活性剤と同等である。

#### 【使用目的又は効果】

内視鏡のレンズの結露を防止するために用いる。

#### 【使用方法等】

- ①内視鏡レンズ面を清掃し、汚れを取り除く。
- ②本品及びスポンジを無菌的に取り出す。
- ③バイアルを開け、スポンジを挿入して本品をスポンジに吸い込ませる。
- ④本品を吸い込ませたスポンジを内視鏡レンズ面に軽く押し当て、内視鏡レンズ面に塗布する。
- ⑤レンズ面には触れずそのまま自然乾燥させる。
- ⑥1回使い切りであるため、余った本品は保管せず廃棄すること。

#### 【使用上の注意】

- ・アレルギー症状を起こした場合は、使用を中止すること。
- ・本品が目に入らないように注意すること。
- ・飲用ではないので、口に入れたりしないこと。
- ・火気の近くでは使用しないこと。

#### ＜使用方法等＞

- ・必ず付属のスポンジを使用すること。
- ・塗布面を十分に乾燥させてから使用すること。
- ・本品を塗布したのち、レンズ面をガーゼ等で拭いたりしないこと。
- ・本品を再塗布する場合は、レンズ面の汚れ等を除去してから行うこと。
- ・手技中に曇りが発生した場合は、速やかに内視鏡を抜き、再度コーティングすること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### ＜貯蔵・保管方法＞

- ・直射日光や火気、高温多湿の場所を避け、常温(25度以下)で保管すること。
- ・結露させないこと
- ・立てて保管すること

##### ＜使用期限＞

包装に記載(自己認証による)

#### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### \*製造販売業者

株式会社ニューロシューティカルズ

東京都文京区本郷一丁目28番10号 本郷TKビル

TEL: 03-3818-6622

##### 製造業者

株式会社ニューロシューティカルズ