

2012年8月16日 作成（第2版）

器 55 医療用洗浄器

一般医療器 洗浄針（JMDNコード：70459000）

ディスプレイザブルカニューレ

【禁忌・禁止】

【形状・構造等】

本品は先端部を塞ぎ、その近傍の側面に1ヶ所の側孔を有するステンレス製の針管と、樹脂製の針基、針管を保護するプロテクターから構成されています。

針のサイズ

外径	長さ (mm)
27G・26G・25G・24G	20・30・40・50・60・70・
23G・20G・19G・18G	80・90・100・110・120

【使用目的、効能又は効果】

1. 本品は洗浄を目的に使用する洗浄針です。

【操作方法又は使用方法等】

1. 包装を開封し、本品をとりだします。
2. 本品の針基部を、シリンジに接合します。
3. プロテクターを取り外し使用します。

【使用方法に関連する注意事項】

- (1) 使用直前に開封すること。
- (2) 必ずロック式のシリンジに接合すること。（ロック式以外のシリンジに接合した場合、接続部が外れる可能性がある）
- (3) 必ずキャップを接着した状態で、シリンジに接合すること。
- (4) シリンジに接合後、緩みが無いことを確認し使用すること。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - (1) 本品の包装が破損・汚損している場合や、製品そのものに損傷・変形等の異常が認められる場合は、使用しないこと。
 - (2) 本品を【使用目的・効能又は効果】に挙げた用途以外に使用しないこと。
2. 重要な基本注意
 - (1) 針管を貼り基の付け根で折り曲げないこと。（針管が折れる可能性がある）
 - (2) 針管の反復折り曲げを行わないこと。（針管が折れる可能性がある）
 - (3) 次亜塩素酸ソーダ溶液等の薬液の中には、金属を侵す性質を有するものや結晶化するものがあるので、薬液を入れた状態で放置しないこと。
 - (4) 洗浄液の飛び出す方向を確認し、口腔粘膜や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

1. 貯蔵・保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて、清潔な場所で保管すること。

2. 有効期間・使用期限

使用期限は外箱に記載

【包装】

100本/箱

【製造販売業者・及び販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造元・製造販売元：株式会社メディカルプランニング

住所：〒357-0046 埼玉県飯能市阿須 445-17