

## ガッタパーチャ ペレット

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- 本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ラテックスによりアナフィラキシー症状様の経験がある医療関係者及び患者へは使用しないこと。

#### 【形状、構造及び原理等】

- 概要  
本品は、歯科で使用するガッタパーチャ製の根管充填材で、熱可塑性、X線不透過性である。歯科根管材料電気加熱注入器により根管内に注入・充填される。
- 形状及び寸法  
円柱形 外径: 約2.8mm  
長さ: 15mm

原材料: ガッタパーチャ、酸化亜鉛、硫酸バリウム、蜜蝋、色素、炭酸カルシウム、ジブチルヒドロキシトルエン

#### 【使用目的又は効果】

歯の根管の充填に用いる。

#### 【使用方法等】

- 使用するガッタパーチャ ペレットを2.5%次亜塩素酸ナトリウム溶液により消毒する。
- ガッタパーチャ ペレットをシステムBコードレス フィル(認証番号: 224ADBZX00293000)のスロットに入れる。
- システムBコードレス フィルのプランジャーを軽く押してペレットをシステムBコードレス フィルの加熱チャンバーに収納する。
- システムBコードレス フィルを操作し、ガッタパーチャペレットが加熱チャンバー内で十分に加熱され軟化した時点で、システムBコードレス フィルのトリガーをゆっくり引いてガッタパーチャを根管内に注入する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

本品を高圧蒸気滅菌や乾熱滅菌しないこと。

#### 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ラテックスに対する感受性の高い患者では発疹、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、血圧低下などのアレルギー症状やアナフィラキシーショックを起こす可能性がある。従って、本品を使用する前には必ず患者のラテックスに対する感受性を評価し、このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師の診断をうけさせること。

#### \*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]  
高温多湿を避けて保管すること。

[有効期間]  
・36ヶ月 [自己認証(製造元データ)による]  
使用期限は、包装に記載。

#### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社  
連絡先 : 03-6866-7480  
製造業者 : オームコ社(Ormco Corporation)  
国名 : アメリカ (U.S.A.)