



＊ ＊ 2016年12月(第6版)(新記載要領に基づく改訂)  
＊ 2012年 4月(第5版)

医療機器認証番号：16100BZZ01130000

歯科材料 5 歯科用接着充填材料  
管理医療機器 歯科用エッチング材 36153000

## K エッチャント GEL

### 【形状・構造及び原理等】

| 構成品    | 形状 | 組成                       |
|--------|----|--------------------------|
| エッチング材 | 液体 | 精製水<br>りん酸<br>着色剤<br>増粘剤 |
| 付属品    |    | 混和皿、小筆                   |

＊ ＊ 本品に同梱されている構成品等についてはパッケージの記載をご参照ください。

### 【作動・動作原理等】

本材はりん酸の酸性度により歯又は歯科修復物の清掃及び微小凹凸面の形成を行う。

### 【使用目的又は効果】

歯又は歯科修復物のエッチング(技工専用を除く。)に用いる。

### 【使用方法等】

#### ①本材の塗布

本材を混和皿に取り、小筆を用いて窩洞(エナメル質及び象牙質)に塗布する。

#### ②本材の水洗、乾燥

40秒間処理した後、本材を水洗し、窩洞を乾燥する。

#### ③接着、充填操作

組合わせて使用する歯科用象牙質接着材料の塗布、歯科充填用コンポジットレジン等の充填を行う。当該品の使用方法は添付文書にしたがうこと。

### 【使用方法に関連する使用上の注意】

エッチング処理をした歯面が唾液等で汚染されないように注意すること。

汚染された場合は再度エッチング処理を行うこと。

### 【使用上の注意】

#### 1) 使用注意

①本材の使用に際し、必要に応じてラバーダム等の防湿処置を行うこと。

②本材を誤飲させないように注意すること。

③使用時の感染防止のため、患者間での交差使用は避けること。

④本材が衣服に付着した場合は水洗すること。本材は静置すると固化することがあります。固化した場合は、キャップをしたまま容器を振ると元の液状に戻ります。

#### 2) 重要な基本的注意

①本材の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

②本材との接触による過敏症状の予防のため、使用に際しては、手袋の着用等の適切な防護処置を行うこと。

③本材は刺激性があるため、口腔軟組織、皮膚に付着したり、目に入らないように注意すること。万一、口腔軟組織や皮膚に付着した場合、炎症やびらんを起こす恐れがあるため、ただちに多量の水で洗浄すること。また、目に入った場合には、ただちに多量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

・本材は、2～25℃で保管すること。

#### 【使用期限】

本材は包装に記載の※使用期限までに使用すること。

【記載の使用期限は自己認証(当社データ)による】

※(例 Exp. 2019-12-31 は使用期限2019年12月31日を示す。)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＊ 製造販売元：

**クラレノリタケデンタル株式会社**

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

フリーダイヤル：0120-330922

販売元：

**株式会社モリタ**

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL(06)6380-2525

〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL(03)3834-6161