



\*2017年 8月(第2版)(新記載要領に基づく改訂)  
2014年 8月(第1版)

医療機器認証番号: 226ABBZX00089000

歯科材料 05 歯科用接着充填材料  
管理医療機器 歯科用エッチング材 36153000

## K エッチャント シリンジ

ニードルチップの再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- ・本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・ニードルチップの再使用禁止。

### 【形状・構造及び原理等】

構成品	形状	組成
エッチング材	ゲル	精製水、リン酸、着色剤、増粘剤

### 【付属品】

ニードルチップ(E)

\*本品と同梱されている構成品等についてはパッケージの記載をご参照ください。

### 【作動・動作原理等】

本品はリン酸の酸性度により歯又は歯科修復物の清掃及び微小凹凸面の形成を行う。

### 【使用目的又は効果】

歯又は歯科修復物のエッチング(技工専用を除く。)に用いる。

### 【使用方法等】

#### ① 本品の準備

- 1) シリンジのキャップをはずし、ニードルチップを時計回り方向に回して確実に取り付けます。  
使用後にキャップを装着して保管していただくために、キャップは捨てずに保管してください。
- 2) 練和紙、ガーゼ等に少量試し出しを行い、適切に吐出できるか確認してください。

#### ② 被着面の前処理

併用する材料の添付文書にしたがい、被着面の前処理を行います。

#### ③ エッチング材の塗布

本品をゆっくりと押し出し、被着面に塗布します。エッチング処理時間は併用する材料の添付文書にしたがってください。  
参考処理時間: 5~10秒

使用後はニードルチップを廃棄し、ただちにシリンジにキャップを確実に装着してください。

交差感染を防ぐため、使用前後にシリンジをアルコール綿球等で拭き消毒してください。また、使用時には必ずポリ袋等の保護カバーでシリンジの全体を覆い、唾液・血液等が接触しないようにしてください。

#### ④ 水洗・乾燥

本品を水洗・乾燥します。

#### ⑤ 接着操作

併用する材料の添付文書にしたがって行ってください。

### 【使用方法に関連する使用上の注意】

1. エッチングの処理条件は併用する材料の添付文書にしたがうこと。
2. エッチング処理面が唾液等で汚染されないように注意すること。汚染された場合は再度処理を行うこと。

### 【使用上の注意】

#### 1) 使用注意

- ① 本品の使用に際し、必要に応じてラバーダム等の防湿処置を行うこと。
- ② 本品を誤飲させないように注意すること。
- ③ 他の材料と混和して使用しないこと。
- ④ 交差感染を防ぐため、使用前後にシリンジをアルコール綿球等で拭き消毒すること。また、使用時には必ずポリ袋等の保護カバーでシリンジの全体を覆い、唾液・血液等が接触しないように注意すること。
- ⑤ 本品が衣服に付着した場合は水洗すること。
- ⑥ 使用後はニードルチップを廃棄し、ただちにシリンジにキャップを確実に装着して保管すること。

#### 2) 重要な基本的注意

- ① 本品は刺激性があるため、口腔軟組織や皮膚に付着した場合、炎症やびらんを起こす恐れがあります。術者は手袋等を用いて直接本品に触れないようにすること。また、口腔軟組織や皮膚に付着したり、目に入らないように注意すること。飛散液から患者を保護するため、眼部をタオル等で覆うこと。
- ② 本品が口腔軟組織や皮膚に付着した場合、ただちに多量の水で洗浄すること。また、目に入った場合には、ただちに多量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
- ③ 本品の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。
- ④ 本品との接触による過敏症状の予防のため、使用に際しては、手袋の着用等の適切な防護処置を行うこと。本品の使用により過敏症状を起こした場合には使用を中止し、専門医の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

- ・本品は、2~25℃で保管すること。

#### 【使用期限】

- ・製造日から48ヶ月
- ・本品は包装に記載の※使用期限までに使用すること。

※(例 Exp. 2020-08-31 は使用期限2020年8月31日を示す。)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:

**クラレノリタケデンタル株式会社**

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28  
フリーダイヤル: 0120-330922

販売元:

**株式会社モリタ**

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL (06) 6380-2525  
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL (03) 3834-6161