

エアージョ

[警告]

(使用方法)

- 一過性のめまい、気圧障害、肺過膨張等の症状が生じた場合は、直ちに使用を中止すること。


[禁忌・禁止]

- 次の患者や以下の状態の方には使用しないでください。
 喀血、気胸、右心不全、結核症
- 本品は同一患者使用のため、他の患者に使用しないこと。
- 16歳以下の方は、大人の監視下でのみご使用ください。

[形状、構造及び原理等]

1. 形状

本品は、マウスピースカバー、マウスピース本体、コーン型玉受け、ボール及びキャップから構成される。

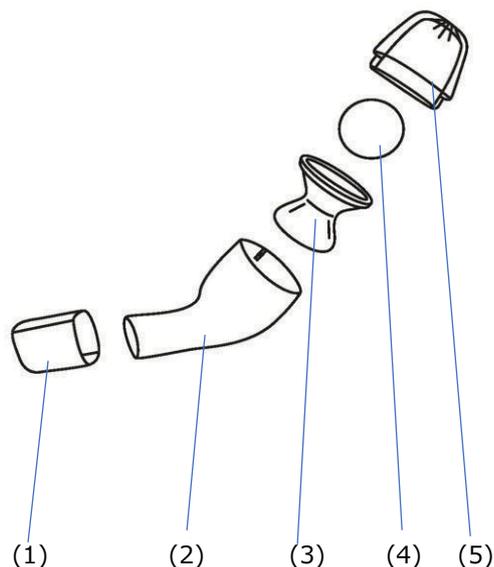

- (1) : マウスピースカバー (2) : マウスピース本体
 (2) : コーン型玉受け (4) : ボール
 (5) : キャップ

2. 原材料

マウスピースカバー: ポリカーボネート
 マウスピース本体: ポリカーボネート
 コーン型玉受け: ポリカーボネート
 ボール: ステンレススチール
 キャップ: ポリカーボネート

3. 原理

患者の呼気がマウスピースから開口部を通る際、ボールが抵抗となり、呼気圧が上昇する。呼気を繰り返し吹き込み、ボールが浮沈することによって、振動を伴った陽圧が発生し、気道を押し広げる。呼気はキャップの穴から外部へと吐き出される。

[使用目的又は効果]

本品は、患者の気道へ呼気陽圧の振動刺激を与え、換気を改善する非能動型装置です。

[使用方法等]

1. リラックスして、楽な姿勢を取ります。座ってもいいし、立ったままの姿勢でもいいです。
2. マウスピースを唇で包み込むように咥えます。
3. マウスピースを咥えたまま、ゆっくりと鼻から息を吸い込み、2～3秒間息を止めます。
4. 口から本体にゆっくりと長く息を吐き出します。
5. 3及び4の動作を最大10分間繰り返します。
6. 息を吐き出した後、喉の奥に痰が溜まっているのを感じたら、咳をして痰を排出してください。

[使用上の注意]

1. 本品は、患者の気道に刺激を与え、排痰を促進し、換気を改善することを目的として設計されています。それ以外の目的での使用はおやめください。
2. 使用中に異常があった場合は、直ちに使用を中止してください。
3. 使用中、頭が少しくらうすることがあります。これは吐き出される二酸化炭素の量のため、正常なことです。そうなった場合休憩を取り、普通の呼吸を続けてください。
4. 子供の手の届かないところに保管してください。
 本品は洗浄のため、各部品に分解できるように設計されています。分解された部品を口に含むと窒息の可能性があります。
5. 本品は非滅菌状態で出荷されています。最初の使用前に洗浄してください。

[保管方法等]

直射日光の当たらない涼しい乾燥した場所に保管してください。

[保守・点検に係る事項]

1. 洗浄・消毒方法
 - 1) 使用後、分解し、各部品を中性洗剤と温水で洗浄します。
 - 2) 滅菌水又は5分間煮沸した水ですすぎ、乾かします。
 - 3) 部品を滅菌水から取り出し、振って中に余分な水が残らないようにします。
 - 4) すべての部品を自然乾燥させます。ヒーターやドライヤーを使用しないでください。
 - 5) 部品が完全に乾いたら、部品を再度組み立て、清潔で乾燥した場所で保管してください。
 - 6) 週1回は哺乳瓶用などの洗浄液に浸けて除菌、消毒することをおすすめします。
2. 点検
 - 1) 使用前に各部品に破損、変形、変色等の損傷がないか確認します。
 - 2) 使用前に、各接続部がしっかりと接続されているか確認します。

[製造販売業者の名称等]

製造販売業者: コビュー・ジャパン株式会社
 TEL: 050-8881-2699
 www.covue.com