

再使用禁止

## バシガッタパーチャポイント


### 【禁忌・禁止】

- ・本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・ラテックスによりアナフィラキシー症状様の経験がある医療関係者及び患者へは使用しないこと。
- ・再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

#### 【形状・構造】(\*)

本品は、歯の根管の充填に用いる、X線不透過性で、大テーパ(4種)ポイントである。

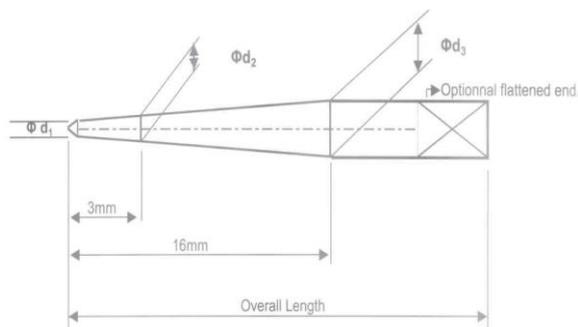

| サイズ名  | 表示番号   | カラーコード | 全長(mm) |
|-------|--------|--------|--------|
| 25/03 | 025.03 | 赤      | 28     |
| 30/03 | 030.03 | 青      | 28     |
| 35/03 | 035.03 | 緑      | 28     |
| 40/03 | 040.03 | 黒      | 28     |
| 25/04 | 025.04 | 赤      | 28     |
| 25/05 | 025.05 | 赤      | 28     |
| 30/05 | 030.05 | 青      | 28     |
| 35/05 | 035.05 | 緑      | 28     |
| 40/05 | 040.05 | 黒      | 28     |

【原材料】 ガッタパーチャ、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム、硫酸バリウム、着色剤

#### 【原理】

歯根管の充填用ポイントであり、適用するサイズを選択し、側方圧を加え、充填する。

### 【使用目的又は効果】

歯の根管の充填に用いること。

### 【使用方法等】

- ①根管を拡大、形成する。
- ②使用するガッタパーチャを亜塩素酸ナトリウム溶液で消毒する。
- ③ガッタパーチャポイントに根管充填用シーラーを付着させる。
- ④根管拡大、形成時使用したファイルに適合するガッタパーチャポイントを挿入し、上下動を行いながら根尖まで挿入する。
- ⑤スプレッターを用いてガッタパーチャに側方圧を加え、根管空隙が充塞されるようにガッタパーチャを順次追加して挿入する。
- ⑥根管口から出ている余分なガッタパーチャは切除する。

### 【使用方法に関連する使用上の注意】

- ・本品を高圧蒸気滅菌や乾熱滅菌しないこと。

### 【使用上の注意】

- ・本製品は天然ゴムを使用しているため、ラテックスに対する感受性の高い患者は使用しないで下さい。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

- ・高温多湿を避けて保管すること。

#### 【有効期間】

- ・製造日から4年[自社認証(製造元データ)による]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 (株) ビーエスエーサクライ  
住所 名古屋市天白区高島一丁目117-1  
TEL 052-805-1181  
外国製造業者 シュアデント コーポレーション  
Sure Dent Corporation  
国名 韓国