

機械器具 22 検眼用器具  
一般医療機器 シノプトフォア (JMDN コード 36058000)

## Occlu-pad オクルパッド

### 【禁忌・禁止】

- ・訓練を行う眼(弱視眼)が偏光フィルターを通して画面が見える様に使用すること。決して健眼のみに画像が見えるメガネは使用しないこと。[健眼のみに画像が見える様(訓練を行わない眼)に使用すると、訓練効果が得られないだけでなく、場合によっては弱視眼の程度が進む可能性がある。]
- ・一日の視聴時間がトータルで1時間を超えないこと。[長時間画像を見ることにより、眼疲労が生じ、更に一過性の近視化が進む懸念がある。]
- ・訓練を行う患眼を間違えない様、偏光メガネとブロックはセットにして患児名を記入して管理、使用後は双方とも廃棄すること。[無記名で使用すると訓練対象とする患眼を間違える可能性がある。また、長期使用による偏光性能の劣化が多くなり、目的とする訓練効果が無くなる可能性がある。]

### 【形状・構造及び原理等】

#### <構成>

詳細は取扱説明書「I各部の名称及び外観図」を参照。



\*色はロットによって異なる場合があります

#### <寸法・重量>

エアー : 240(L)×170(W)×7.5(H) 9.7inch  
ミニ : 200(L)×140(W)×7.5(H) 7.9inch

#### <原理>

画面の偏光板を剥離したタブレット端末。これにより裸眼では白にしか見えない画面であるが、偏光フィルターをセットした偏光メガネを使用することにより、タブレット端末の画面が視認できるようになる原理。これにより、目的とする側の眼にのみ映像を見せる事が出来、指及びブロックにて操作を行う。これにより両眼視機能の評価及び視機能訓練が可能となる。

### 【使用目的又は効果】

眼の両眼視機能(両眼で1つの物体に焦点を合わせる能力)の評価及び訓練に用いる眼科用機器。

### 【使用方法等】

取扱説明書を参照。

### 【使用上の注意】

#### <重要な基本的注意>

- (1) 指示された時間以上使用しないこと。
- (2) 偏光メガネとタンジブル ブロックは使用者の名前を記入し、間違いの無い様管理すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### <保管条件>

タブレット本体は常温に保管すること。

但し、80%以上の湿度は避ける。

偏光メガネとブロックは間違いを避ける為に使用後に廃棄すること。

### 【保守・点検に係る事項】

タブレット端末の画面は必要に応じてガラスクリーナーで清掃する。偏光メガネの清掃は乾いた光学レンズクリーニングクロスにて清掃し、水分は避けること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 製造販売業者

ジャパン フォーカス株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 4-37-18

TEL (03)3815-2611 FAX (03)3815-7284

#### 製造業者

ヤグチ電子工業株式会社

宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門 3 0 1

#### 緊急連絡先

ジャパンフォーカス株式会社 TEL (03)3815-2611

株式会社 JFC セールスプラン TEL (03)5684-8531

取扱説明書を必ずご参照下さい。