

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用注入器具
JMDN コード：70718000

レストラティブ ディスペンサー

【形状・構造及び原理等】

本品は、下図のとおり、カプセルに入った歯科材料を装着し、口腔内に注入する器具である。

原材料：ステンレススチール、プラスチック

【構造】



【使用目的又は効果】

歯科材料を口腔内に注入するために用いる。

【使用方法等】

1. 操作方法

- 1) ディスペンサーの先端にあるカプセル挿入部分が上部になるようにカプセルホルダーを回す。
- 2) カプセルを挿入し、カチッと音が聞こえるまではめ込む。
- 3) ハンドルをゆっくりと均一な力で手前に引き、ペーストを押し出す。
- 4) ハンドルを元の位置に戻し、カプセルホルダーからカプセルを取り外す。

《使用方法等に関連する使用上の注意》

カプセルが固定されなくなる可能性があるため、使用中は過剰な力をかけないこと。

2. 洗浄

- 1) 洗浄前に、視認できる不純物は取り除くこと。ハンドルの内側は使い捨てのやわらかいブラシを用いて、本製品とカプセルホルダーはやわらかい布を用いて流水で1分間以上ゆすぐ。
- 2) 自動洗浄器を使用する場合は、医療機器等に適した洗浄器を使用し、その使用方法に従い、指定の消毒液を用いて洗浄を行うこと。
- 3) 自動洗浄後、本製品に損傷や不純物が残留していないかを確認すること。
- 4) 超音波洗浄器を使用する際は、医療機器等に適した洗浄器を使用し、洗浄器メーカーや洗剤メーカーの使用説明書に従って使用すること。

《使用方法等に関連する使用上の注意》

- 1) ケミクレープは、消毒液が残留する可能性があり、行わないこと。
 - 2) 汚染除去に用いる洗浄剤、消毒剤は、過酸化水素等の酸化剤、アルデヒド、溶媒、オイルを含むものは使用しないこと。消毒液は、中性もしくはアルカリ性の溶液を適正な濃度で使用すること。
 - 3) ブラシを使用する場合は、やわらかいものを用い、金属製のブラシやスチールウールは使用しないこと。
3. 滅菌
- 1) 本製品は、個別に滅菌バッグにパッケージすること。
 - 2) 使い捨ての滅菌バッグで包装し、オートクレープ滅菌を行い、滅菌器メーカーの使用説明書に従い135℃を超えない温度で行うこと。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- 1) 使用前に、汚れ、損傷、変色等異常がないか点検すること。
- 2) 損傷が見られた場合は、使用しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

- * 名称：スリーエム ジャパン イノベーション株式会社
** TEL：0120-332-329（カスタマーコールセンター）