

一般医療機器

機械器具(36) 医療用ピンセット  
歯科咬合紙用ピンセット JMDNコード：31813000

## Y型咬合紙ホルダー

### 【禁忌・禁止】

#### ＜使用方法＞

- (1) 本品は、直接火炎にさらさないこと〔咬合紙保持用補助器具のため〕。
- (2) 本品は、必ず使用前に傷・バリ等がないことを確認し、口腔内を傷つける可能性がある場合には使用しないこと。
- (3) 本品の汚れ除去時には、ワイヤーブラシ・ヤスリ等鋼鉄工具を使用しないこと〔サビの発生・破折・性能・品質等の低下となる〕。
- (4) 本品を変形させたり切削したりする等の加工・改造は行わないこと。
- (5) 歯科治療以外の目的で使用しないこと。また、使用時に必要以上の力を加えないこと〔折損・曲がりなどの原因になり得る〕。


### \* 【保管方法及び有効期間等】

#### ＜保管方法＞

- (1) 錆びる恐れがあるため水分が付着したまま保管しないこと。
- (2) 本品はステンレス製ですが、湿度の高い場所に長時間放置すると錆びが発生するおそれがあるため、湿度が低く、清潔な場所に保管すると共に有効期間の管理をすること。
- (3) 使用（滅菌）前に、汚れ・傷・曲がり等に異常がないか確認すること。
- (4) 強アルカリ・強酸性洗剤、消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるため使用を避けること。また、金属タワシ、クレンザー（磨き粉）などは、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

本品の材質は、ステンレス鋼である。

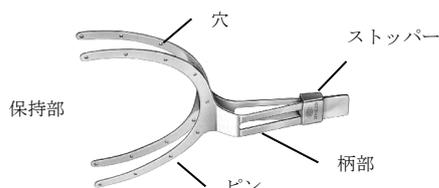

品名	包装
○ Y型咬合紙ホルダー 大	1本入
○ Y型咬合紙ホルダー 小	1本入

#### ＜原理等＞

保持部に挟んだ咬合紙を、ストッパーにより保持する。保持部のピンを穴にしっかりと嵌めることにより、咬合紙を固定する。

### 【使用目的又は効果】

2つのバネ性の先端部をもち、咬合紙を保持するために用いる歯科用器具をいう。

### 【使用方法等】

#### ＜装着方法＞

保持部に咬合紙を挟んだ後、ストッパーをスライドさせる。保持部のピンを穴に入れ、咬合紙を固定する。

#### ＜使用方法＞

噛み合せを調査・確認する際に、本品にて咬合紙を保持する。

### 【使用上の注意】

- (1) 本品は歯科医療有資格者以外、使用しないこと。
- (2) 製品の仕様は改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- (3) 本品は、長期間使用により、鋼材の疲労・摩耗で耐久性の低下が生じますので適時交換すること。
- (4) 本品は、一般歯科用の消毒が可能です。
- (5) 通法に従い、必ず滅菌を行うこと（オートクレーブ可）。

### 【保守・点検に係る事項】

- (1) 本品は必ず使用前に傷・バリ等がないことを確認すること。口腔内を傷つける可能性がある場合には新しい物と交換すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町 53-5

TEL：03-3964-2011

FAX：03-3962-5624