

一般医療機器

機械器具(36) 医療用ピンセット
歯科咬合紙用ピンセット JMDNコード：31813000

M型咬合紙ホルダー

【形状・構造及び原理等】

**本品の材質は、ステンレス鋼である。

咬合紙保持部



把持部

〈原理等〉

咬合紙保持部に咬合紙を挟み、保持する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町5-3-5

TEL：03-3964-2011

FAX：03-3962-5624

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

○ 歯科用咬合紙の保持用補助器具

〈効果〉

○ 片顎用咬合紙の保持用補助器具

【使用方法等】

〈使用方法〉

咬合関係確認時に、咬合紙を本品で保持し咬合関係確認部に挿入する。

〈装着方法〉

通法に基づき咬合紙を挟む。

【使用上の注意】

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外 使用しないこと。
- (2) 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
- (3) 本品は咬合紙保持用補助器具なので直接火炎にさらさないこと。
- (4) 本品は必ず使用前に傷・バリ等がないことを確認し、口腔内を傷つける可能性がある場合には使用しないこと。
- (5) 錆の発生・破折・性能、品質の低下につながるため、本品の汚れ除去時には、ワイヤーブラシ・ヤスリ等鋼鉄工具を使用しないこと。
- (6) 製品の仕様は改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- (7) 折損・曲がりなどの原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。
- (8) 本品は長期間使用により、鋼材の疲労・摩耗で耐久性の低下が生じるため 適時交換すること。
- (9) 本品はステンレス製であるため、一般歯科用の消毒が可能である。
- (10) 通法に従い、必ず滅菌を行うこと。(オートクレーブ可)

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- (1) 錆びる恐れがあるため水分が付着したまま保管しないこと。
- (2) 本品はステンレス製ですが、湿度の高い場所に長時間放置すると 錆びが発生するおそれがあるため、湿度が低く、清潔な場所に保管すると共に有効期間の管理をすること。
- (3) 使用（滅菌）前に、汚れ・傷・曲がり等に異常がないか確認すること。
- (4) 強アルカリ・強酸性洗剤、消毒液は、器具を腐食させる恐れがあるため使用を避けること。また、金属たわし、クレンザー（磨き粉）などは、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。