


機械器具(67) 歯科用防湿器  
一般医療機器 歯科用ラバーダムクランプ JMDNコード: 15712000  
ラバーダムクランプ

\*\*【形状・構造及び原理等】

- (1) 本品の材質は、ステンレス鋼である。
- (2) 本品の表面仕上げは磨き(ラバーダムクランプ)、つや消し(ラバーダムクランプ マット)、黒(ラバーダムクランプ ブラック)の3種類からなる。
- (3) 本品の代表的な形状は以下の外観写真の通りである。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
株式会社デンテック  
〒174-0053 東京都板橋区清水町 5-3-5  
TEL: 03-3964-2011  
FAX: 03-3962-5624

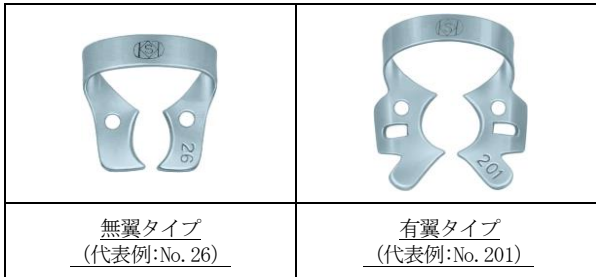

〈原理等〉

本品はバネ性を有し、左右に広げることでバネ力により歯牙に装着される。

【使用目的又は効果】

歯頸部にラバーダムを押さえつけるために用いる。

\*【使用方法等】

〈使用方法〉

- (1) 最適なクランプの形式を選択し、試適する。
- (2) ラバーダムにラバーダムパンチを用いて穴を開ける。
- (3) 本品をラバーダムの穴に通し、ラバーダムクランプ鉗子で本品とラバーダムを同時に把持して治療部位に適合させる。その際通法に基づき、必要に応じて麻酔等の処置を行う。
- (4) ラバーダムをラバーダムフレームに掛ける。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- (1) 誤嚥防止のため、あらかじめ本品にフロス等を付けておくこと。
- (2) 周辺歯肉等を挟み込まないよう注意すること。

\*【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- (1) 使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に記載する方法及び条件に基づき洗浄、滅菌を行うこと。
- (2) 破損の恐れがあるため、必要以上に本品を広げないこと。
- (3) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄すること。

\*【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- (1) 腐食を防ぐため、洗浄後は直ちに乾燥させ、湿気の少ない場所に保管すること。
- (2) 汚染を防ぐため清潔な場所に保管すること。
- (3) 製品の識別のため、商品ラベルを大切に保管すること。

\*【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項〉

使用前に、汚れ、傷、曲がり、損傷等の異常がないか点検すること。

〈洗浄・滅菌方法〉

- (1) 強アルカリ/強酸性洗剤又は消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用しないこと。
- (2) 金属たわし、クレンザー等は、器具の表面が損傷するので使用しないこと。
- (3) 滅菌は132℃で5分間または121℃で20分間のオートクレーブ滅菌とする。