

一般医療機器

機械器具(67) 歯科用防湿器
歯科用ラバーダムクランプ JMDNコード: 15712000

ガーゼクランプ

【禁忌・禁止】

- (1) 本品の拡張の限度は、適合歯牙の最大豊隆部+1.5mm以内とし、必要な巾以上に本品を広げないこと。[器具の破折の恐れがある]
- (2) 器具の形態変更や改造・分解等はしないこと。
- (3) 電気メスを用いた接触凝固は、併用しないこと。[術者が感電、火傷をする危険性がある。また、器械の表面を損傷する]

【形状・構造及び原理等】

- (1) 本品の形式として、左右対称のG-1とG-2があり、各々以下の3種類の表面状態のものがある。
 - ・ガーゼクランプ : スタンダードなタイプ
 - ・マット(つや消し) : 表面が梨地のタイプ
 - ・ブラック : 表面が黒いタイプ
- (2) 材質は、ステンレス鋼である。



G-1 下顎左臼歯用



G-2 下顎右臼歯用

品名	包装
○ガーゼクランプ G-1, G-2	2個組
○ガーゼクランプ G-1, G-2 マット (つや消し)	2個組
○ガーゼクランプ G-1, G-2 ブラック	2個組

＜原理等＞

本品は、広いウイングで舌と頬を圧排する。本品は、バネ性である。ラバーダムクランプ鉗子にてピークを左右外側にひろげて装着する。装着後ひろげられていたピークを戻し、歯牙に本品をはめることができる。

【使用目的又は効果】

露出させた歯の歯頸部にラバーダムを押さえつけるために用いる、頬側及び舌側の羽根又は輪縁を備えた歯科用器具をいう。簡易防湿材の保持のために用いることもある。

**【使用方法等】

＜使用方法＞

ラバーダムクランプ鉗子で本品を把持し、治療部位に適合させる。その際通法に基づき、必要であれば、麻酔等の処置を行う。舌側・口蓋側のウイング下にガーゼ等を使用する。

【使用上の注意】

＜使用注意＞

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (2) 使用前に必ず洗浄・滅菌(保守・点検に係る事項参照)をすること。
- (3) 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- (1) クランプ・ガーゼ等の誤飲には十分にご注意ください。
- (2) 本品の歯牙への取り付けは周辺歯肉等に十分配慮すること。
- (3) 指等をはさまないように注意すること。
- (4) ラバーダムを掛けることはできません。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- (1) 保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥をすること。
- (2) 滅菌済みのものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管すること。
- (3) 通法に従い、必ず滅菌を行うこと(オートクレーブ可)。
- (4) 製品の識別のため、商品ラベルを大切に保管すること。

*【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、刃の損傷等、異常がないか点検すること。
- (2) 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。
- (3) 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- (4) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸漬すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町5-3-5

TEL : 03-3964-2011

FAX : 03-3962-5624