

\* 2006年4月20日改訂(第4版)

一般医療機器  
 歯科材料(09) 歯科用研削材料  
 歯科技工用ダイヤモンド研削材 JMDNコード: 70902000  
**デュアルダイヤモンドポイント**

**【禁忌・禁止】**

＜使用方法＞

- (1) 使用前に傷やバリ、破損、芯ブレなどの異常がないか確認すること。
- (2) オートクレーブ・ケミクレーブは、錆の原因となるため使用しないこと。
- (3) 使用前に必ず器具がしっかりと装着されているかを確認すること。
- (4) 回転数は30,000r.p.m以下で行うこと。
- (5) 切削時に過剰な力を加えないこと。破折やチッピングの原因となります。

- (3) 本品は、刃物であるため取り扱いには充分注意すること。
- (4) 折損・曲がりなどの原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。

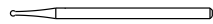
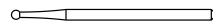



**【保管方法及び有効期間等】**

＜保管方法＞

- (1) 錆びる恐れがあるため水分が付着したまま保管しないこと。
- \* (2) 湿度が低く、清潔な場所に保管すること。
- (3) 錆が発生したり、劣化した恐れのある製品は廃棄し、使用しないこと。
- \* (4) 金属たわし等は、器具の表面が損傷するので器具清掃時に使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】**

本品の材質は、ステンレス鋼である。

品名	外観図	切削部最大直径
#1A		φ1.2mm
#1		φ2.0mm
#2A		φ3.1mm
#2		φ4.8mm
#3		φ6.0mm

**【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者  
 株式会社 デンテック  
 〒174-0053 東京都板橋区清水町 53-5  
 TEL: 03-3964-2011  
 FAX: 03-3962-5624

品名	包装
○デュアルダイヤモンドポイント #1A	1本入
○デュアルダイヤモンドポイント #1	1本入
○デュアルダイヤモンドポイント #2A	1本入
○デュアルダイヤモンドポイント #2	1本入
○デュアルダイヤモンドポイント #3	1本入
○デュアルダイヤモンドポイント アソート	
#1, #2, #3	各1本入

＜原理等＞

本品は、ハンドピースに装着し、回転させて使用する。

**【使用目的又は効果】**

＜使用目的＞

- 石膏作業模型の形成及びトリミング。

＜効果＞

- 石膏作業模型のマージン部等をトリミングする。

**【使用方法等】**

＜使用方法＞

- (1) 技工用マイクロモーターに本品を装着する。
- \* (2) 本品にて、石膏作業模型マージン部の形成を通法により行う。  
 回転数は、1分間に30,000回転以下にて使用する。

**【使用上の注意】**

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (2) 製品の仕様は改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。