

一般医療機器

\* 機械器具(65) 歯科用充填器  
 歯科用充填器 JMDNコード：70680000  
**ニューインレーセッター**

**【禁忌・禁止】**

- (1) シリコンゴムは交換のために外れるようになっているため、口腔内での取り扱いには十分注意すること。
- (2) 器具の脱落は誤飲等の重大事故につながる危険性が高いので、十分に確認作業を行い注意して取り扱うこと。

- (3) 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- (4) 製品の使用は改良のため、お断りなく変更することがありますので、ご了承下さい。
- (5) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸漬すること。

**【形状・構造及び原理等】**

本品の材質は、ステンレス鋼及びシリコンゴムである。

短柄



長柄



シリコンゴム



品名	包装
ニューインレーセッター アソート	(短柄、長柄)各 1本入
ニューインレーセッター 短柄	2本入
ニューインレーセッター 長柄	2本入
ニューインレーセッター用シリコンゴム	4個入

＜原理等＞

突起部を補綴物の側に、シリコンゴム部を対合歯にセットし咬み合わせる。

長柄（ピン短）－大白歯用、短柄（ピン長）－小白歯用。

**【使用目的又は効果】**

＜使用目的＞

インレー及びクラウンをセメント合着するときの補助器具。

＜効果＞

インレー及びクラウン等の補綴物をセメント合着するとき、装着位置に咬ませることにより補綴物の浮上がり防止する。

**【使用方法等】**

＜使用方法＞

- (1) 患歯に適したインレーセッターを選択する。
- (2) 選択した本体にシリコンゴムを装着する。
- (3) 通法に基づきインレーもしくはクラウンを患歯に装着する。
- (4) 患歯側にピン部、対合歯側にシリコンゴム部をセットしゆっくり咬ませる。
- (5) インレーもしくはクラウンが合着した後、本品を取外す。

**【使用上の注意】**

＜使用注意＞

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (2) 購入時は未滅菌の為、使用前に必ず洗浄・滅菌を行い、次回からの使用時にも同様に行うこと。  
オートクレーブ可 121℃で20分間

\*＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- (1) 本品は必ず使用前にシリコンゴムやハンドル、ピン等のガタつきや緩みなどがないことを確認すること。使用に適さない場合には新しい物と交換すること。
- (2) 本品は必ず使用前に傷・バリ等がないことを確認し、口腔内を傷つける可能性がある場合には、新しい物と交換すること。
- (3) 本体及び各パーツが小さいので誤飲等の事故を予防するため、取り扱いには十分注意すること。
- (4) 万一誤飲した場合は、直ちに専門医の診察を受けること。

**【保管方法及び有効期間等】**

＜保管方法＞

- (1) 保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥をすること。
- (2) 本品はステンレス製ですが、湿度の高い場所に長時間放置しますと錆びて器具として機能しなくなる恐れがあるので、湿度が低く、清潔な場所に保管すること。
- (3) 消毒方法によってはシリコンゴムが硬く変質してしまう可能性があります。（殺菌灯 使用不可）

**【保守・点検に係る事項】**

- (1) 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、歯の損傷等に異常がないか点検すること。
- (2) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。
- (3) 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- (4) 通法に従い、必ず滅菌を行うこと（オートクレーブ可）。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町 5-3-5

TEL：03-3964-2011

FAX：03-3962-5624