


機械器具(62) 歯科用切削器
一般医療機器 歯科用エキスカベータ JMDNコード：35811000

エキスカベーター

【形状・構造及び原理等】

本品の材質は、ステンレス鋼である。

スプーンエキスカ #38-39

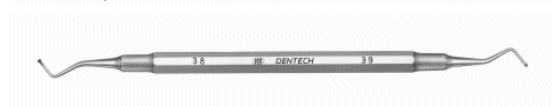

【使用目的又は効果】

う蝕部の軟化象牙質除去、及び窩洞形成が可能。

【使用方法等】

〈使用方法〉

通法にもとづき、う蝕部の軟化象牙質を除去する。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に記載する方法及び条件に基づき洗浄、滅菌を行うこと。
- (2) 破損・曲がり等の原因になりますので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- (3) 本品は、長期間使用により、鋼材の疲労・摩耗で耐久性の低下が生じますので適時交換すること。
- (4) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- (1) 腐食を防ぐため、洗浄後は直ちに乾燥させ、湿気の少ない場所に保管すること。
- (2) 汚染を防ぐため清潔な場所に保管すること。
- (3) 製品の識別のため、商品ラベルを大切に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項〉

使用前に、汚れ、傷、曲がり、損傷等の異常がないか点検すること。

〈洗浄・滅菌方法〉

- (1) 強アルカリ／強酸性洗剤又は消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用しないこと。
- (2) 金属たわし、クレンザー等は、器具の表面が損傷するので使用しないこと。
- (3) ケミクレープは、錆の原因となるため使用しないこと。
- (4) 滅菌は132℃で5分間または121℃で20分間のオートクレープ滅菌とする。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町 53-5

TEL：03-3964-2011

FAX：03-3962-5624