

一般医療機器

機械器具（49）医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器

歯科用スチールバー JMDNコード：16669000

スタンパー

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

- (1) 使用前に傷やバリ、破損、芯ブレなどの異常がないか確認すること。
- (2) オートクレーブ・ケミクレーブは、錆の原因となるため使用しないこと。
- (3) 使用前に必ず器具がしっかりと装着されているかを確認すること。
- (4) 回転数は30,000rpm以下で使用すること。
- (5) 切削時に過剰な力を加えないこと。破折やチッピングの原因となります。

*【保管方法及び有効期間等】









〈保管方法〉

- (1) 湿度が低く、清潔な場所に保管すること。
- (2) 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。
- (3) 水分及び薬品等が付着したまま保管しないこと。
- (4) 金属たわし等での清掃は、器具の表面が損傷するため避けること。
- (5) 錆が発生したり、劣化した恐れのある製品は廃棄し、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品の材質は、ステンレス鋼である。

**サイズは大・小の2種。

品名	AK	BK	CK	FK
形状				
品名	A	B	C	F
形状				

〈原理等〉

本品は、技工用マイクロモーターに装着し、回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

石膏模型や歯科用レジンの形成

〈効果〉

- (1) 石膏や歯科用レジン等の歯科用材料で形成された歯牙形態の形成を間接法で行う。
- (2) 歯科用レジンで作成されたデンチャーの歯肉部（顎底など）を形成する。

【使用方法等】

〈使用方法〉

技工用マイクロモーターに本品を装着し、余剰部位・形成部位の形成を行う。

*【使用上の注意】

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (2) 製品の仕様は改良のため、お断りなく変更することがありますので、ご了承下さい。
- (3) 本品は、刃物ですので取扱には充分注意すること。
- (4) 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- (5) 長期の使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町 53-5

TEL：03-3964-2011

FAX：03-3962-5624