

【禁忌・禁止】

- (1) ミディアム、シンは天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。また、過去にアナフィラキシー症状様の経験がある医療関係者及び患者には使用しないこと。
- (2) 再使用禁止

【使用方法に関連する使用上の注意】

- (1) ガタパーチャーの軟化材やクロロホルム等の薬液が、本品の主成分である天然ゴム、合成ゴムを溶かすことがあるため、ゴムを溶かす能力のある薬液を使用する場合には、本品にかからないよう十分注意すること。
- (2) 購入時は未滅菌のため、使用前に必ず消毒等を行うこと。

【使用上の注意】

- (1) ラバーダムパンチにキズがある場合、本品が破れる原因となるため、ラバーダムパンチにキズがないことを確認すること。
- (2) 近接した穴は破れやすくなるため、2ヶ所以上のパンチ穴を本品に開ける場合は、引っ張る際に注意すること。
- (3) 使用前に本品を引っ張り、破れないことを確認すること。

【形状・構造及び原理等】

形式	主成分	寸法	厚み	色	入数
** ミディアム	天然 ゴム	6 インチ 152×152	約 0.2mm	グリーン	36 枚
** ミディアム パウダーフリー			約 0.22mm	グリーン	
シン			約 0.16mm	アイボリー	
** シン パウダーフリー			約 0.18mm	アイボリー	
ノンラテックス	合成 ゴム		約 0.2mm	ブルー	20 枚
ノンラテックス パウダーフリー			約 0.25mm	パープル	15 枚

※表面に白い粉状の斑点・すじが見られる場合がありますが、白い粉はタルクです。また、製造上、縁の一部にシミのようなものが見られる場合がございます。
 いずれの場合も、品質に問題はなく安全に使用できます。

【原理等】

本品は、ゴム製のためよく伸縮し、歯牙等にぴったりと装着することができる。

【使用目又は効果】

歯科治療中に口腔内で手術野を隔離するため、パンチで穴をあけ、歯牙に被せるラテックスゴム製シートをいう。合成ゴム等のシートからなるものも含む。

【使用方法等】

【使用方法】

本品にラバーダムパンチを用いて穴を開け、ラバーダムクランプに装着後、ラバーダムクランプ鉗子でクランプを把持し、治療部位に適合させる。その際通法に基づき、麻酔等の処置を行なう。本品の端はヤングフレームに掛ける。
 ※特に多数歯を露出する場合、ラバーダムテンプレートの併用が可能。（適正な穿孔位置を決定し穴の位置をマークする）

【保管方法及び有効期間等】

*** [保管方法]**

開封後は直射日光・高温・湿気を避けて保管し、なるべく早めに使用すること。

[有効期間]

使用期限はパッケージに記載。使用期限を過ぎたものは使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者
株式会社 デンテック
〒174-0053 東京都板橋区清水町5-3-5
TEL：03-3964-2011 FAX：03-3962-5624
- 外国製造業者
Four D Rubber Co, Ltd. (イギリス)
Sanctuary Health Sdn Bhd (マレーシア)