

一般医療機器

* 機械器具(65) 歯科用充填器
歯科用マトリックスバンド JMDNコード：16195000

マトリックスバンド


*再使用禁止

【禁忌・禁止】

- (1) 電気メスを用いた接触凝固は、併用しないこと。〔術者が感電、火傷をする危険性がある。また、器械の表面を損傷する〕

【形状・構造及び原理等】

本品の材質は、ステンレス鋼である。

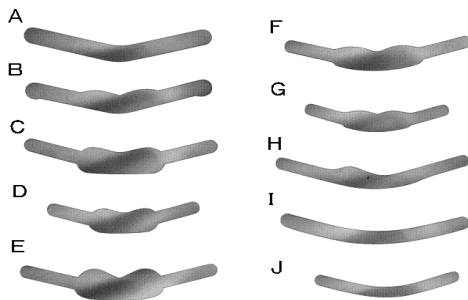

品名	長さ mm	巾 mm	包装
マトリックスバンド# A	63	6	100 枚入
マトリックスバンド# B	63	7.6	100 枚入
マトリックスバンド# C	65	8	10 枚入
マトリックスバンド# D	51	5	10 枚入
マトリックスバンド# E	66	5	10 枚入
マトリックスバンド# F	64	5	10 枚入
マトリックスバンド# G	49	4.5	10 枚入
マトリックスバンド# H	64	4.5	10 枚入
マトリックスバンド# I	64	5	100 枚入
マトリックスバンド# J	50	4	100 枚入

〈原理等〉

本品は、患歯に適合しマトリックスリテーナーで固定する。

* 【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

修復材に一般的輪郭を与え、修復材を閉じ込めるステンレス製のバンドである。マトリックスリテーナー等により所定の位置に取り付ける。修復する歯の形状のほか、隣接する歯の位置に応じて適切な形になるように輪郭をつけるためのものである。

〈効果〉

窩洞形成した歯牙に修復材等を充填する時に使用する。本品をマトリックスリテーナーで保持し歯牙に巻き付け固定することにより、修復材等を充填したときに歯牙に合着するまでの間、剥離を防止出来る。

【使用方法等】

〈使用方法〉

- (1) 使用前に必ず消毒・滅菌すること（オートクレーブ可）。
- (2) 症例に適したマトリックスバンドを選択する。
- (3) バンドをリテーナーに装着し、患歯に適合する。
- (4) 場合によって楔を挿入して歯間離開をはかる。

〈操作方法〉

- (1) 適当な大きさのバンドを選び、折り目を付けないように中央から曲げる。

- (2) マトリックスリテーナーの操作方法に従い、リテーナーで本品を保持する。
- (3) 本品を円錐形にして、患歯に適合する。
- (4) リテーナーのつまみを時計廻りに回転すると、バンドは締めまり、歯牙にしっかり固定される。

【使用上の注意】

〈使用注意〉

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (2) 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- (3) 製品の使用は改良のため、お断りなく変更することがありますので、ご了承下さい。
- (4) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸漬すること。

* 〈使用方法に関連する使用上の注意〉

- (1) バンドを固定溝に装着する際には、バンドの端がはみ出さないように注意しながら、下まできっちり挿入すること。
- (2) バンドが本品にしっかり固定されていることを確認すること。
- (3) 患歯にバンド及び本品を固定するときは、周辺粘膜等に十分配慮すること。
- (4) 器具の脱落は誤飲等の重大事故につながる危険性が高いので、十分に確認作業を行い注意して取り扱うこと。
- (5) 万一誤飲した場合は、直ちに専門医の診察を受けること。
- (6) 本品は、必ず使用前に傷・バリ等がないことを確認し、口腔内を傷つける可能性がある場合には、新しい物と交換すること。

* 【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- (1) 本品はステンレス製ですが、湿度の高い場所に長時間放置しますと錆びて器具として機能しなくなる恐れがあるため、湿度が低く、清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり等の損傷等に異常がないか点検すること。
- (2) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町 53-5

TEL：03-3964-2011

FAX：03-3962-5624