

一般医療機器

機械器具(64) 歯科用探針
歯周ポケットプローブ JMDNコード：31848000
コンタクトゲージ

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- (1) 本品は、歯肉を傷つける可能性があるので取り扱いには十分に注意すること。
- (2) 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、又、器械の表面を損傷するので併用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品の材質は、ステンレス鋼である。
コンタクトゲージ 本体



ゲージ

青ゲージ
(0.05 mm)

黄ゲージ
(0.11 mm)

赤ゲージ
(0.15 mm)



品名	包装
○コンタクトゲージセット (本体、青ゲージ1枚)	1セット
○コンタクトゲージ用ゲージ 青ゲージ	2枚入
○ " 黄ゲージ	2枚入
○ " 赤ゲージ	2枚入

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

接触点診査用器具。

＜性能又は効果＞

金属冠の製作時や、食片圧入の診断に際して理想的な歯の隣接接触関係を客観的に診査できる。

【使用方法等】

＜使用方法＞

通法にもとづき口腔内検診を行い、歯間に最適な厚さのゲージ（0.05mm、0.11mm、0.15mm）をホルダー本体に装着し、歯間にはさんで計測する。
前歯部、臼歯部ともに使用可能である。

【使用上の注意】

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (2) 破損・曲がり等の原因になり得るので、使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- (3) 製品の仕様は改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- (4) 本品は、長期間使用により、鋼材の疲労・摩耗で耐久性の低下が生じるため適時交換すること。
- (5) 本品はステンレス製のため、一般歯科用の滅菌消毒が可能である。
- (6) 本品の汚れ除去時には、ワイヤーブラシ・ヤスリ等鋼鉄工具を使用しないこと〔サビの発生・破折・性能・品質等の低下となる〕。
- (7) 使用後は、器具に付着している血液・体液・組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに拭き取り洗浄液等に浸漬すること。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- (1) 本品は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。

- (2) 本品は、必ず使用前に傷・バリ等がないことを確認し、口腔内を傷つける可能性がある場合には使用しないこと。
- (3) 本品は、必ず使用前にガタつきや緩みなどがないことを確認すること。使用に適さない場合には新しい物と交換すること。
- (4) 器具の脱落は誤飲等の重大事故につながる危険性が高いので、十分に確認作業を行い注意をして取り扱うこと。
- (5) 本品は接触点診査用器具です。火災にさらしたり、他の目的に使用しないこと。
- (6) 必要以上に深くコンタクトに押し込みますと、歯肉等を傷つける恐れがありますので十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- (1) 錆びる恐れがあるため水分が付着したまま保管しないこと。
- (2) 本品はステンレス製ですが、湿度の高い場所に長時間放置しますと錆びて使用出来なくなる恐れがありますので、湿度が低く、清潔な場所に保管すると共に有効期間の管理をすること。
- (3) 消毒方法によっては変色したり、錆びる可能性があります。
- (4) 使用（滅菌）前に、汚れ・傷・曲がり等に異常がないか確認すること。
- (5) 強アルカリ・強酸性洗剤、消毒剤は、器具を腐食させる恐れがありますので使用を避けること。また、金属タワシ、クレンザー（磨き粉）などは、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

＜耐用期間＞

製造出荷後、正規の保守点検を行った場合に限り、5年とする。
〔自己認証（当社データ）による〕

【保守・点検に係る事項】

本品は必ず使用前に傷・バリ等がないことを確認すること。
口腔内を傷つける可能性がある場合には新しい物と交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町 53-5

TEL：03-3964-2011

FAX：03-3962-5624