

一般医療機器

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
歯科印象採得用トレー JMDNコード: 16350000
ファインロックトレー

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

- (1) 本品は、必ず使用前に傷・バリ等がないことを確認し、口腔内を傷つける可能性がある場合には使用しないこと。
- (2) 本品は、直接火炎にさらさないこと。
- (3) 本品を変形させたり切削したりする等の加工・改造は行わないこと。

【形状・構造等】

**本品の材質は、真鍮、ニッケルメッキである



上顎用
U-11
U-12
U-13
U-14



下顎用
L-11
L-12
L-13
L-14

品名	包装
○ファインロックトレー 上顎用 4種	各1個入
○ファインロックトレー 下顎用 4種	各1個入
○ファインロックトレー 8個組	計8個入
(上顎用4種, 下顎用4種)	

【使用目的又は効果】

歯列の印象採得を行う際に使用する。

【使用方法等】

- (1) 歯列印象材を本品に盛り口腔内に挿入する。
- (2) 口腔内歯列部位に押しあて、通法に基づき印象採得を行う。

【使用上の注意】

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (2) 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
- (3) 製品の仕様は改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- (4) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- (5) 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また、器械の表面を損傷するので、併用しないこと。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- (1) 132℃迄の蒸気滅菌には耐えるが、140℃以上の高温乾燥には耐えない。乾燥工程が自動で高温になるオートクレーブは使用しないこと。
- (2) 塩化ベンザルコニウム液(ハイアミン等)をトレーの消毒に使用した場合、変色する可能性があるので注意すること。
- (3) 本品は使用前、キズ・バリ等がないことを確認すること。

- (4) 印象採得後、歯列部位より本品を剥がす際は取っ手に大きな力が掛かるので、必ず印象面の陰圧を除去してから外すこと。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 本品は、汚染及び錆を防ぐため、清潔で湿度が高くない場所にて保管・管理すること。
- (2) 錆びるおそれがあるため水分が付着したまま保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり等に異常がないか点検すること。
- (2) 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。
- (3) 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社デンテック
〒174-0053 東京都板橋区清水町5-3-5
TEL: 03-3964-2011
FAX: 03-3962-5624