

機械器具(67) 歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダムクランプ JMDNコード: 15712000

クランプ付ボード

**【形状・構造及び原理等】


- (1) 本品の材質は、ステンレス鋼である。
(2) 本品の表面仕上げは磨き、つや消し(マット)、黒(ブラック)の3種類からなる。

- クランプ付ボード# 8
○クランプ付ボード# 8 マット
○クランプ付ボード# 8 ブラック

- * ○ケース入り クランプ付ボード# 8
○ケース入り クランプ付ボード# 8 マット
○ケース入り クランプ付ボード# 8 ブラック
※ケース入りはウルトラライトケース Sが付属する。




[クランプの形式]
(左から)
9, 9
5, 203, 2A
56, 204, W2A

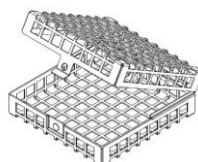

*ウルトラライトケース S

- クランプ付ボード# 12
○クランプ付ボード# 12 マット
○クランプ付ボード# 12 ブラック

**

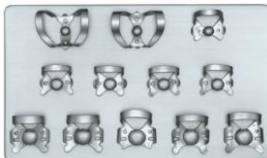

[クランプの形式]
(左から)
210, 9, 0
2, 2A, 206, 207
5, 56, 7, 201, 202

- クランプ付ボード# 18
○クランプ付ボード# 18 マット
○クランプ付ボード# 18 ブラック

**



[クランプの形式]
(左から)
210, 9, P-1, P-2
22, 27, 29, 208, 209
18, 138, 139, 7,
201, 202, 203, 204, 205

[原理等]

本品はパネ性を有し、左右に広げることでパネ力により歯牙に装着される。

【使用目的又は効果】

歯頸部にラバーダムを押しえつめるために用いる。

**【使用方法等】

[使用方法]

- (1) クランプをクランプボードのピンに掛け、収納・保管、チェアサイドでの整列をする。そのままオートクレープで滅菌することも可能である。

- (2) 最適なクランプの形式を選択し、試適する。
(3) ラバーダムにラバーダムパンチを用いて穴を開ける。
(4) 本品をラバーダムの穴に通し、ラバーダムクランプ鉗子で本品とラバーダムを同時に把持して治療部位に適合させる。その際、通常法に基づき、必要に応じて麻酔等の処置を行う。
(5) ラバーダムをラバーダムフレームに掛ける。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- (1) 誤嚥防止のため、あらかじめ本品にフロス等を付けておくこと。
(2) 周辺歯肉等を挟み込まないように注意すること。

**【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- (1) 使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に記載する方法及び条件に基づき洗浄、滅菌を行うこと。
(2) 破損の恐れがあるため、必要以上に本品を広げないこと。
(3) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄すること。

**【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- (1) 腐食を防ぐため、洗浄後は直ちに乾燥させ、湿気の少ない場所に保管すること。
(2) 汚染を防ぐため清潔な場所に保管すること。
(3) 製品の識別のため、商品ラベルを大切に保管すること。

**【保守・点検に係る事項】

[使用者による保守点検事項]

使用前に、汚れ、傷、曲がり、損傷等の異常がないか点検すること。

[洗浄・滅菌方法]

- (1) 強アルカリ/強酸性洗剤又は消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用しないこと。
(2) 金属たわし、クレンザー等は、器具の表面が損傷するので使用しないこと。
(3) 滅菌は132℃で5分間または121℃で20分間のオートクレープ滅菌とする。

- * ※クランプ付ボード# 8は洗浄および滅菌の際にウルトラライトケース Sを使用することができる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町5-3-5

TEL: 03-3964-2011

FAX: 03-3962-5624