

**一般医療機器

**機械器具（58） 整形用機械器具
**歯科用インプラント手術器具 JMDNコード：70965001

**テクニカ 歯肉ゲージ

**【禁忌・禁止】



＜使用方法＞

- (1) 本品の加工・改造は行わないこと。[インプラント及び器具の破損や不適切な設置による術後成績不良が発生するおそれがある。]
- (2) 変形や破損した場合は使用しないこと。[インプラント及び器具の破損や不適切な設置による術後成績不良が発生するおそれがある。]

- (4) 本品を使用中に機能が低下したり、汚染したおそれのある場合には、すぐに使用を中止し、新しいものと交換すること。
- (5) 骨質が薄い場所に強い力を加えると、骨内にも刺さり、入っていく可能性があるため、十分に注意すること。
- (6) 測定針は細いため、曲がりに注意すること。
- (7) 本品は、使用前に必ず口腔外にて、破損・曲がりなどの支障がないことを確認すること。
- (8) 検査部位には必ず麻酔を行なうこと。

**【形状・構造及び原理等】

本品の材質はステンレス鋼である。

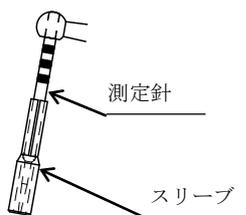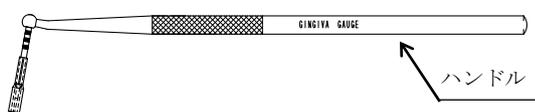

先端部拡大図

**【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- (1) 錆びる恐れがあるため水分・血液などが付着したまま保管しないこと。
- (2) 本品はステンレス製ですが、湿度の高い場所に長時間放置しますと錆びて器具に装着出来なくなる恐れがあるため、湿度が低く、清潔な場所に保管すること。

**【保守・点検に係る事項】

- (1) 消毒用薬液、洗浄剤の濃度・浸せき時間・温度など使用法は、各メーカーの指示に従い正しく使用すること。消毒用薬液としては次のものを推奨する。
グルタラル製剤(ハイドリッドなど)
グルコン酸クロルヘキシジン(ヒビテンなど)
- (2) 次の成分を含む消毒用薬液は、錆への影響が高いため使用しないこと。
塩素系薬液(次亜塩素酸ナトリウムなど)、過酸化水素系薬液(オキシドールなど)、強酸性水、及び防錆効果のない界面活性剤系薬液(塩化ベンゼトニウム液、塩化ベンザルコニウム液、両性界面活性剤など)。
- (3) 乾熱滅菌は、高温になり劣化の原因になるので使用しないこと。
- (4) 錆びた製品は、汚染を引き起こす可能性があるため、錆びていない製品と一緒に滅菌しないこと。
- (5) 滅菌後は錆がないか点検し、錆が認められた場合には、新しいものと交換すること。
- (6) 錆びるおそれがあるため次のことについて留意すること。
 - ・血液・骨が凝固付着したまま乾燥させないこと。
 - ・最終洗浄は精製水を使用すること。
 - ・湿度が高くて自然乾燥に時間を要する場合には、ドライヤーなどで強制的に乾燥させること。
 - ・汚れ、水分、洗浄剤などが付着したまま滅菌しないこと。
 - ・オートクレーブ滅菌の場合、精製水を用い、水道水は使用しないこと。
- (7) 本品使用後は、すぐに消毒用薬液（上記(1)、(2)参照）又は消毒効果及び防錆効果のある洗浄剤に浸せきし、その後、超音波洗浄器、ブラシなどを用いて洗浄し、付着物を完全に除去すること。
- (8) 金属たわし、クレンザー（磨き粉）などは、器具の表面が損傷するので、汚物除去および洗浄時に使用しないこと。

**【使用目的又は効果】

本品は、術部歯肉の厚さの計測や、骨の形態を把握するために用いる器具である。尚、本品は再使用可能である。

**【使用方法等】

- (1) 通法に基づき麻酔を行った後、測定針の先端をスリーブで隠した状態で、ゲージを計測部位の歯肉に直角に当てる。
- (2) 軽い力で歯肉を穿孔して測定針の先端が骨に接触するまで押し込む。
- (3) スリーブを動かさないように静かに測定針を引き抜き、スリーブの後端に表示される歯肉の厚さを読み取る。この操作は手指にて行う。

**【使用上の注意】

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (2) 製品の仕様は改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- (3) 本品は、針部が鋭いため、使用中に患者の術部以外の口腔内、顔面、術者の手指などを傷つけないように取扱いは充分注意すること。
- (4) 術後は、使用、未使用にかかわらず所定の消毒・洗浄・滅菌を行うこと。

**【使用方法に関連する使用上の注意】

- (1) 購入時は未滅菌の為、使用前に必ず洗浄・滅菌を行い、次回からの使用時にも同様に行うこと。
オートクレーブ可 121℃で20分間
- (2) 本品は、使用するまで常に滅菌後の汚染に注意し、手指・未滅菌の器具などで直接触れないこと。
- (3) 錆や変色のおそれがあるため、長時間整理食塩水に浸漬しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町 53 番 5 号

TEL : 03-3964-2011

FAX : 03-3962-5624