

一般医療機器

歯科材料(07) 歯科用ワックス  
歯科用パターン成形品 JMDNコード：31836030

## レジンポストメタアクリル

### 【形状・構造及び原理等】

材質：メタアクリル樹脂

形状：本品は以下の種類からなる



名称	色	入数
レジンポストメタアクリル #R1	透明ブルー	50個入
レジンポストメタアクリル #R2	透明イエロー	50個入
レジンポストメタアクリル #R3	透明レッド	50個入

〈原理等〉

口腔内の印象採得用材料で、修復物の制作に用いる既成パターンである。材質は融点の低いメタアクリル樹脂を混合したもので、加熱により軟化・溶解させて使用する。

### 【使用目的又は効果】

〈使用目的又は効果〉

修復物等の制作に用いる既成パターンで、ワンピースメタルコア用焼却パターンである。鑄造等によって金属等に置き換えることができる。

### 【使用方法等】

〈使用方法〉

- (1) 支台歯のポスト孔長に合致した長さのポストを選択する。  
(根管最終形成時使用したドリル先端径のポストを選択する)
- (2) 予め根管形成を完了した支台歯のポスト孔に、選択したサイズの本品を嵌める。
- (3) パターンレジンまたはワックスを満たしたバルキャップを本品頭部に被せ、位置・形状を調整したのち過剰レジン又はワックスを除去する。
- (4) 硬化を待ってからバルキャップと本品が一体のまま作業模型から抜き取り、その後通法に従い鑄造を行う。

### 【使用上の注意】

〈使用注意〉

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (2) 本品は可燃性であるため、使用の際・火傷等には十分注意すること。
- (3) 本品を使用する場所には、消火器具を備えること。

### 【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- (1) 本品は、高温・直射日光を避けて火気厳禁の室温で保管すること。
- (2) 本品の保管場所には消化器具を備えること。
- (3) 本品は一箇所の保管庫に大量に保管しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町5-3-5

TEL：03-3964-2011

FAX：03-3962-5624