

## ピンライト2

### 【禁忌・禁止】

#### 1. 禁忌滅菌用ガス

酸化エチレンガス・ホルムアルデヒドガス・過酸化水素ガス・  
二酸化塩素ガス

[滅菌用機器類に滅菌用ガスを用いて微生物を殺滅(微生物  
殺滅法)する滅菌を行うと本品に変色及び電気系統に支障が  
生じる恐れがある。]

#### 2. 禁忌薬液

オキシドール(3%水溶液)・次亜鉛素酸ナトリウム水溶液・  
カセイソーダ30%(30%水酸化ナトリウム溶液)・ベンゼ  
ン・トリクレソール・アセトン

[滅菌用薬液の種類によっては本体に変色する恐れがある。]  
その他、記載のない消毒・滅菌・洗浄液などを使用する際は、  
事前に問い合わせること。


#### 3. 併用禁忌

電機メスと併用しないこと。[電気メスを用いた接触凝固は、  
術者が感電、火傷をする危険性があり、又、機械の表面を損  
傷する恐れがある。]

### 【形状・構造及び原理等】

#### テクニカ ピンライト2

- ① 本品の材質は、ステンレス鋼、アルミニウム合金、シリコン  
ゴム、ナイロン、POM樹脂、石英ガラス、FKM(フッ素  
ゴム)である。

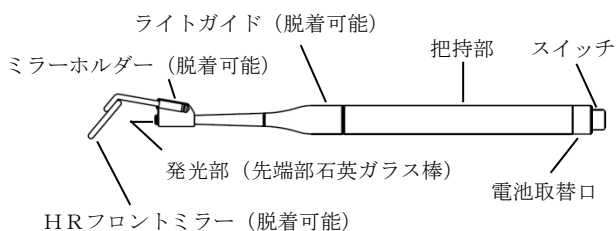

HRフロントミラー	サイズ0
	サイズ4

### 【使用目的又は効果】

窩洞等の面積が小さい患部に光をあてることに用いる。

### 【使用方法等】

#### 「使用方法」

別紙取扱説明書に基づき、確実にHRフロントミラー付きのミ  
ラーホルダー及びライトガイドをセットする。

後端のスイッチを押すことにより発光部を点灯させる。

通法にもとづき口腔内検診を行う。

#### 「装着方法」

本体に電池をセットし確実に蓋をしめる、その際ガタつきや緩  
みがないか確認する。

別紙取扱説明書に基づき、確実にHRフロントミラー付きのミ  
ラーホルダー及びライトガイドを取り付ける。

### 【使用上の注意】

- ① 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従う  
こと。
- ② 器具の形態変更や改造等はしないこと。
- ③ 製品の仕様は改良のため、お断りなく変更することがありま  
すのでご了承ください。
- ④ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ⑤ 歯科治療以外の目的で使用しないこと。また、折損・曲がり

などの原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えない  
こと。

- ⑥ 製品を落とすなど、ライトガイド部に強い衝撃を与えてしま  
った場合は、内部の石英ガラス棒が破損されている可能性が  
あるため、使用しないこと。

### 【使用方法に関連する使用上の注意】

- ① 本品は未滅菌のため、使用前に取扱説明書に基づき必ず洗浄・  
消毒・滅菌を行うこと。(HRフロントミラー、ミラーホルダ  
ー、発光部を含むライトガイドは121℃、20分で滅菌可能)(把  
持部からスイッチまでの後端部は、滅菌不可)
- ② 本品は必ず使用前に傷・バリ・石英ガラス棒の破損等がないこ  
とを確認する事、口腔内を傷つける可能性がある場合には新し  
い物と交換する。
- ③ 本品は必ず使用前にパーツ等のガタつきや緩みなどがないこ  
とを確認すること。使用に適さない場合には新しい物と交換す  
ること。
- ④ 交換可能な部品は口腔内での取扱いに十分注意をする。
- ⑤ 体及び各部品が小さいので誤飲等の事故を予防するために取  
扱いは十分注意をして行う。
- ⑥ 本品は口腔内検診用のため、用途記載以外には使用しないこと。  
また、目には絶対発光部を当てないこと。
- ⑦ 本品の使用後は取扱説明書に準じ直ちに洗浄・消毒・滅菌を行  
うこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ① 錆びる恐れがあるため水分が付着したまま保管しないこと。
- ② 湿度の高い場所に長時間放置した場合、錆びて故障する恐れ  
があるため、湿度が低く、清潔な場所に保管すること。
- ③ 消毒方法によっては本体に変色または、錆びる可能性があるた  
め、取扱説明書の指示に従うこと。
- ④ 変色や脱色、電池蓋パッキン、ライトガイド固定リングの劣  
化につながるため、本品を殺菌灯にあてないこと。
- ⑤ 金属たわし、クレンザー(磨き粉)などは、器具の表面が損傷  
するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- ⑥ 滅菌済みのものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清  
潔な場所に保管するとともに、有効期間の管理をすること。
- ⑦ 取扱説明書に準じたメンテナンスを行うこと。
- ⑧ 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管  
理すること。
- ⑨ 乾電池の液漏れを防止するため、長期間使用しない場合は、  
電池を抜くこと。
- ⑩ 電池蓋パッキン及びライトガイド固定リングが薬液及び摩擦  
により劣化した場合は適宜交換のこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の名称等】

1. 製造販売業者  
株式会社デンテック  
〒174-0053 東京都板橋区清水町5-3-5  
TEL: 03-3964-2011(営業部) FAX: 03-3962-5624
2. 外国製造業者  
\*Roeder Dentalinstrumente GmbH & Co. KG(ドイツ)
3. 販売業者  
有限会社テクニカ  
〒174-0053 東京都板橋区清水町5-3-5  
TEL: 03-5375-0605 FAX: 03-3962-5624

取扱説明書を必ずご参照ください。