

*KSK セクショナルマトリックスリング

【禁忌・禁止】

1. 本品に劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
2. 本品の形態変更や改造などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

材質: ステンレス鋼

形状:

** (1) KSKセクショナルマトリックスリング



** (2) KSKセクショナルマトリックスリング鉗子付き
上記(1)と鉗子から構成される。



KSKセクショナル
マトリックスリング



鉗子

【使用目的又は効果】

本品は、マトリックスを歯の所定の位置に保持するために用いる歯科用器具である。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

- (1) 使用前に本品を滅菌する。
[推奨条件: オートクレーブ 121℃、15 分間]。
- (2) 通法に従い、ラバーダム防湿を施す。
- (3) 通法に従い、窩洞を形成する。
- (4) マトリックス、ウェッジを装着する。
- ** (5) 鉗子を用いて本品を広げて歯頸部に固定することで、歯間を分離する。(誤飲防止のため、使用前には本品にフロス等を付けておくとよい)
- (6) 修復、充填作業を行う。
- (7) 使用後は洗浄・滅菌を行い、高温多湿の場所を避けて保管する。



【使用上の注意】

[使用方法に関連する使用上の注意]

- (1) 本品は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
- (2) 破折、変形の原因になり得るため、使用時に必要以上の力(応力)を加えて広げないこと。
- (3) 本品は繰り返しの使用により、鋼材の疲労・摩耗等で耐久性の低下が生じる製品です。
本品の耐用期間は、使用方法・頻度・洗浄・滅菌・保管などの状況により異なるため、本品の交換時期は、変形が見られる(開きが大きくなる)等の状態や使用頻度から使用者が判断すること。

- (4) 装着時又は撤去時等に歯肉を傷つけないよう、取扱いに注意すること。
- (5) 誤飲事故等防止のため、口腔内での取り扱いに注意すること。
(誤飲防止のため、使用前には本品にフロス等を付ける等の対策を講じること)
- (6) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸漬すること。

【保管方法及び有効期間等】

本品は湿度の高い環境や、水分が付着したまま長時間放置すると、錆びて使用に支障をきたすおそれがあるため、湿度が低く、清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項〉

使用前に、汚れ、傷、変形、損傷等の異常がないか点検すること。

〈洗浄・滅菌方法〉

- (1) 滅菌は 121℃で 15 分間 または 132℃で 5 分間のオートクレーブ滅菌とすること。
- (2) 強アルカリ/強酸性洗剤又は消毒剤は器具を腐食させるおそれがあるため、使用しないこと。
- (3) 金属たわし、クレンザー等は、器具の表面が損傷するため、使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

** 1. 製造販売業者

株式会社 デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町5-3-5

TEL: 03-3964-2011

FAX: 03-3962-5624

** 2. 外国製造業者

AKMO Instruments (パキスタン)

HEALTH MISSION INSTRUMENTS (パキスタン)