

一般医療機器 機械器具 (58) 整形用機械器具  
歯科用インプラント手術器具 70965001

## デンタル用サージカルガイドレジン

### 【形状、構造及び原理】

- 形状、構造
  - 性状：液体
  - 容量：1000ml
- 原理  
本品は、紫外線照射により硬化する。

### 【製造販売業者及び製造者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：株式会社データ・デザイン  
住所：愛知県名古屋市中区錦三丁目4番6号  
桜通大津第一生命ビルディング 12F  
電話番号：052-953-1588

製造業者：Formlabs, Inc. (アメリカ)

### 【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの外科手術に用いる。

### 【使用方法】

- 本品をFormlabs FORM 3Bモデル 3Dプリンタに挿入する。
- ソフトウェアを使用してプリントジョブを準備する。
- プリントジョブを3Dプリンタに送信し、造形を開始する。
- 造形を完了する。
- 造形したパーツを取り外し、イソプロピルアルコールで洗浄する。
- 十分に乾燥させる。
- 造形物に紫外線を照射し、硬化させる。
- 硬化後、サポート材を取り除く。
- 必要に応じて、高圧蒸気滅菌、またはガンマ線により滅菌する。

### 【使用上の注意】

- 歯科従事者以外は使用しないこと。
- 使用しないときは電源コンセントを抜くこと
- 作業時はドアを閉めること
- 目的用途以外に使用しないこと
- 取扱いには十分注意すること

### 【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
  - 涼しい場所で適切に保管する。
  - 直射日光を避け、乾燥した場所に保管する。
  - 火気の近くでの保管は避ける。
  - 歯科医療従事者以外が触れないように、保管・管理する。
- 有効期間  
本品に記載された有効期限までに使用する。