


類別名称：歯科材料06 歯科用印象材料
管理医療機器 一般的名称：歯科用シリコーン印象材 JMDNコード：35866000

販売名：デシコン

【禁忌・禁止】

- 1) 本製品又は類似成分の材料に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者に使用しないこと。
- 2) 本製品又は類似成分の材料に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

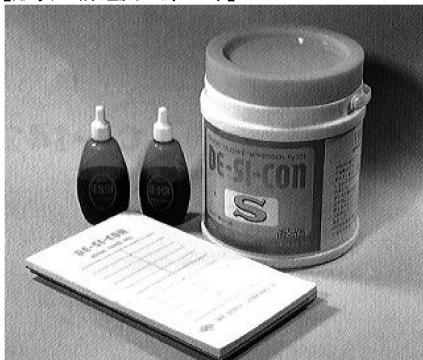

該当規格：JIS T6513 歯科用ゴム質弾性印象材

形状：本材：乳白色ペースト

硬化材：緑色液体

主成分：

本材：シリコーンゴム

硬化材：シリコーン油、有機スズ脂肪酸塩の混合物

(1) 物理的性質（試験方法：JIS）

	デシコン	アルギン酸塩印象材
硬化時間	2分30秒	2～3分
印象精度	25 μ 再現	50 μ 再現
硬度(5分後)	20	—
永久ひずみ	1.5%	2.9%
弾性ひずみ	9.6%	13.2%

【使用目的又は効果】

反応により印象採得に適したゴム状材料を形成するポリシロキサンを主材とする弾性印象材。

(1) 使用目的、用途

口腔内の印象採得を行う材料である

【使用方法等】

(1) 計量

注口ボトルにペーストを移し、練和紙に1cmにつき硬化材1滴の割合で滴下します。

(2) 練和

スパチュラーで硬化材とペーストの色が均一化するまで20～30秒で手早く練和します。

(3) トレー

練和した本材をトレーに盛りつけます。連合印象を行う場合には、パテ状シリコーン印象材で1次印象を予め、印象採得しておきます。

(4) 印象採得

深い窩洞など印象材の流れにくい部分は予め、少量の印象材で採得した後、トレーの残量をやや加圧しながら硬化するまで3～4分間保持します。

* (5) 消毒

採得した印象から血液、唾液などを十分洗浄後、乾燥する。グルタルアルデヒド製剤の溶液に浸して消毒する。浸漬後は、流水で約15秒間洗浄すること。

* (6) 石こうの注入消毒

石こうは硬石膏及び超硬石膏使用する。印象採得後、30分経過後14日以内に石こうを流す。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- (1) 硬化材は使用の都度、必ず密栓すること。空気中の水分で変質することがあります。

【使用上の注意】

(1) 使用注意

- ① 本材の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本材を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こした場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
- ③ 本材又は練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
- ④ 採取した印象は、血液・唾液などを十分洗浄後、必要に応じ消毒を行うこと。
- ⑤ 開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- ⑥ 他の製品と混用しないこと。
- ⑦ 消毒方法の詳細は、使用する薬液の取扱説明書を参照する。

【保管方法及び有効期間等】

[貯蔵・保管方法]

- ・本材は、使用の都度、密栓すること。

[使用期限]

- ① ペースト：製造より2年間
- ② 硬化材：製品に記載の使用期限までに使用すること
[記載の使用期限は当社データによる。]

包装

本材ペースト 1 Kg

硬化材 25mL×2本

練和紙 2冊

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 東洋化学研究所

製造元：同

住所：〒173-0004 東京都板橋区板橋4-25-12

電話番号：03-3962-8811

ファックス：03-3961-1859