

# 添付文書

2022年2月作成(第1版)

医療機器届出番号: 11B1X0001800006

機械器具(55) 医療用洗浄器  
一般医療機器 洗浄針(JMDNコード: 70459000)

## 洗浄針 iNP40-S

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

[外観写真]



[原材料]

- プロテクター: ポリプロピレン
- 針管: ステンレス鋼
- 針基: ポリプロピレン

[寸法] (mm)

- 先端外径:  $\phi 0.46$
- 先端内径:  $\phi 0.30$

[包装]

- 5本 / 袋

#### 【使用目的又は効果】

刃先を有しない針で、口腔、根管など各部の洗浄や破片の除去に用いる。

#### 【使用方法等】

[使用方法]

1. 包装を開封し本品を取り出す。
2. 本品の針基部をシリンジ等に接合しプロテクターを外す。
3. 洗浄部位の形状に合わせて、針管を曲げる。
4. 針管先端を根管に挿入する。
5. 根管内の洗浄用溶液をシリンジ等にて吸引する。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- ・接続部を汚染しないように注意すること。
- ・針管の変形、また刺傷防止のため、必ずプロテクターを付けたままシリンジ等に接続すること。
- ・針基に過剰な負荷をかけないこと。また、接続時にプロテクターで針基に過剰な回転負荷をかけないこと。
- ・シリンジ等に接続後使用前に緩みがないことを確認すること。
- ・接続時に過度の締め付け及び増し締め等には十分注意すること。

#### 【使用上の注意】

- ・針管部を触る時には手袋を着用すること。
- ・使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ及び詰まり等について十分に注意すること。
- ・針管を針基の付け根、あるいは先端部分での折り曲げ、または座屈させないこと。
- ・針管の反復折り曲げを行わないこと。
- ・使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・水濡れに注意し、高温多湿、直射日光を避けて、清潔な場所に保管すること。

[有効期間]

使用期限は外装に記載(自己認証による)

#### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売者: ドクタージャパン株式会社(添付文書の請求先)  
電話: 048-559-0022