

機械器具 57 種痘用器具
管理医療機器 尖叉試験・ワクチン用針 15679022

天然痘ワクチン接種針

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、天然痘ワクチンを接種するために使用される針である。
本品の針先に患者へ接種するワクチンを保持し、出血しない程度に皮膚を傷つけることにより接種を行う。

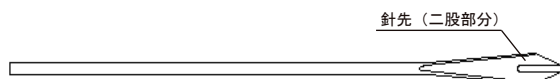

2. 材質

本品	ステンレス鋼
----	--------

【使用目的又は効果】

天然痘ワクチン接種で、同時に複数の穿刺を行うために用いる。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。コンテナバックにより包装されている場合は、シール部で捻って開封します。
2. 本品の二又部分をバイアルに入ったワクチンに浸します。
3. 上腕部の皮膚面をつまみ上げるように強く圧迫します。
4. 針を皮膚面に直角になるように保持し、出血しない程度に針先で15回程度皮膚を傷つけ、ワクチンを接種します。
5. 使用後は感染防止に注意し、安全な方法で廃棄します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意してください。
2. 包装を開封する際に針先が包材に触れないよう注意してください。〔針先が変形するおそれがあります。針先が変形した場合は、本品を新しいものと交換してください。〕
3. 本品をワクチンに浸した際、ワクチンが針先に塗布されていることを必ず確認してください。

【使用上の注意】

1. 不具合・有害事象

- 1) その他の不具合
- (1) 誤穿刺

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

*有効期間：滅菌後11年〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社