

医療用品（4）整形用品
一般医療機器 カテーテル被覆・保護材（救急絆創膏）
JMDNコード 70444000（34864000）

ユーテープ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

本品の形状・構造は下記の通りである。

[平面図]

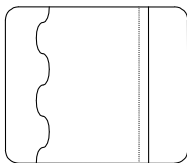

[断面図]

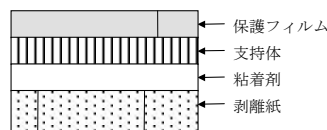

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
室温保存
2. 有効期間
3年（自己認証データによる）
使用期限は包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：日東電工株式会社
TEL 03-6632-2013

[発売元/問合せ先]

祐徳薬品工業株式会社
お客様相談窓口 TEL 0954-63-1320
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日は除く）

部品名	原材料名	摘要
保護フィルム	ポリプロピレンフィルム	—
支持体	ポリエーテル・ポリアミドブロック共重合樹脂フィルム	—
粘着剤	アクリル系粘着剤	※
剥離紙	シリコーン処理ポリエチレンラミネート紙	—

※：患者の健全皮膚又は創傷面に接触する部材

サイズ・包装

製品番号	サイズ	入数/箱
No. 6	6cm×6.5cm	50枚
No. 12	10cm×12cm	30枚
No. 18	15cm×18cm	10枚

【使用目的又は効果】

1. カテーテル固定用途
注射針又はカテーテル刺入部位に直接貼付して、その固定に用いる。
2. 救急絆創膏用途
傷の被覆及び保護、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

(貼付方法)

- 1) 剥離紙の波形の切れ込みの所を折り曲げて、剥離紙の広い方をミシン目の所まではがす。
- 2) 粘着面を適用部位にあてて、しわにならないようにはりつけ、剥離紙の狭い方を取り去る。
- 3) 剥離紙の残った部分を押さえ、保護フィルムの広い方をはぎ取る。
- 4) 残った剥離紙を取り去り、最後に保護フィルムの狭い方をはぎ取る。

(除去方法)

周囲の皮膚を軽く押さえながら、端から静かに剥がし取る。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
本品使用中に皮膚障害と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
2. その他の注意
 - 1) 本品は開封後、直ちに使用すること。
 - 2) 本品を再滅菌しないこと。
 - 3) 本品を貼付する前に適用部位を十分に消毒すること。