

## JMS 臍帯クリップ


### 再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止

#### \*【形状・構造及び原理等】

湾曲部を介してレ字形に屈折している。柄部の内側には結紮後、臍帯が移動することを防止するため、刻目のある噛合部が設けられている。柄部の先端には一方は嵌合嘴、他方には嵌合受入部があり緊着できる構造である。

〈構成(代表例)〉

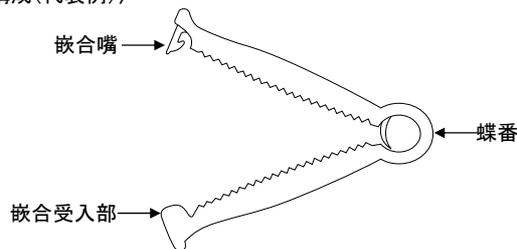

\*\*・本品にはナイロンを使用している。

#### \*【使用目的又は効果】

胎児分娩時における臍帯の結紮に使用するクリップで、そのまま直ちに使用できかつ1回限りの使用で使い捨てるものである。

#### \*【使用方法等】

1. 包装から本品を取り出します。
- \*2. 腹部から約2cm離れたところの臍帯を本品で締めます。
- \*3. 臍帯は本品から胎盤側に約1cm離れたところで切り離します。
4. 臍帯が確実に結紮されていることを確認し、結紮・切断の約30分～1時間後には臍帯から出血がないことを確認してください。
- \*\*5. 約24時間後に、臍帯が十分乾燥したことを確認し、剪刀等で本品の蝶番部分を切って本品を取り外します。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

\*結紮する位置をよく確認した上で使用すること。[一度結紮すると位置の修正ができない。]

#### \*【保管方法及び有効期間等】

\*〈有効期間〉

3年 [自己認証(当社データ)による]  
包装の使用期限欄を参照すること。

#### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
株式会社ジェイ・エム・エス  
電話番号：082-243-5806