

オキシマイザーペンダント

再使用禁止

【警告】

使用方法

結露しないようにし、リザーバー部の動作が正常であることを常に確認すること。[リザーバー部の動作が正常でない仕様を満たさない。]

【禁忌・禁止】

適用対象(患者)

鼻呼吸が出来ない人(口呼吸者)は使用しないこと。[適切な酸素投与が行えないおそれがある。]

併用医療機器

*本品を呼吸同調器と共に使わないこと。[本品の仕様から逸脱する。]

使用方法


- * 再使用禁止。[感染を引き起こすおそれがある。]
- * 火気から2m以内で本品を使用しないこと。[火災発生のおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

組成

*ポリ塩化ビニル、ABS樹脂、シリコンゴム

形状

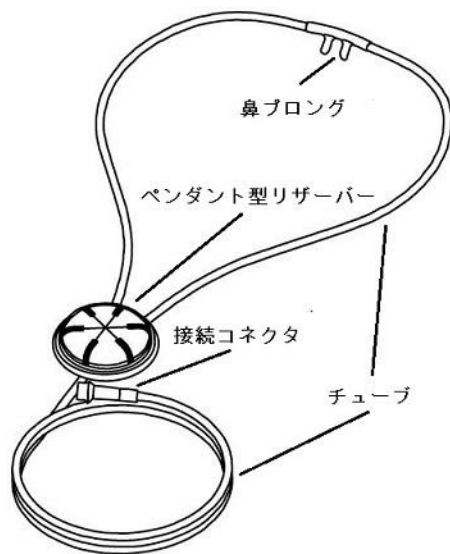

作動・動作原理

酸素供給源から供給される酸素は、チューブ及び鼻ブロングを通じて患者の鼻孔に運ばれる。呼気時、リザーバーが膨らみ、そこに酸素供給源からの酸素が流れ込む。そして吸気時、通常供給される酸素に付加してリザーバーに蓄えられた酸素も供給される。これにより、効率よく酸素吸入をすることが可能になる。

品目仕様等

重量: 約86g
使用温度: 0~50°C
使用湿度: 15~95% (結露なきこと)

【使用目的又は効果】

使用目的

酸素供給器に併用して、鼻腔より酸素ガスを吸入させて呼吸を補助する。

【使用方法等】

使用方法

1. チューブを挟まないように注意し、ペンダントの前面(スリットのある面)が前方を向くように持つ。
2. 鼻ブロングを鼻孔に装着する。
3. 鼻ブロングを固定し、チューブを両耳にかける。
4. ペンダント型リザーバーを喉の下(胸部)に置く(衣服の下にしまうことも可能)。
5. 接続コネクタを酸素供給源に接続する。
6. 酸素供給を始め、医師に処方された流量に設定する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・本品は医師の処方及び指示に従って使用すること。医師は本品を使用した状態での適切な酸素流量を処方すること。
- ・油やグリース、石油製品等を本品の近くで使用しないこと。
- ・本品の近くでスプレー類、高可燃性物質を使用しないこと。
- ・血液中の酸素飽和度を、パルスオキシメータ又は血液ガス分析装置などにより定期的に確認すること。
- ・本品は3週間を目安に交換すること。使用環境により、より早い時期に交換が必要な場合もある。
- ・加湿器は、結露してリザーバーの動きが阻害されることのないように十分に注意して使用すること。
- ・水濡れに注意し、高温多湿を避けて使用すること。
- ・チューブにねじりや折り曲げ、破損等がある場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・水濡れ、高温多湿、粉塵及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所や有毒ガスのある場所に保管しないこと。
- ・保管条件: 周囲温度 -40~63°C
相対湿度 1~95% (結露なきこと)

有効期間

5年 [自己認証(輸入先データ)による]

耐用期間・使用期間

**使用期間: 3週間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 日本ルフト株式会社
住 所: 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目7番地5
電話番号: 03-3518-2001
製造業者: Inovo, Inc. (アメリカ合衆国)

取扱説明書を必ずご参照ください。