

一般医療機器 医 04 整形用品 34864000 救急絆創膏

FCストップバン レギュラー

再使用禁止

【禁忌・禁止】 してはいけないこと

再使用禁止：一度使ったものは、使用しないでください。

再滅菌禁止：再度、滅菌しないでください。

【形状・構造及び原理等】


ポリウレタンフィルムにアクリル系粘着剤を使用した粘着テープです。

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合等を目的とする絆創膏です。

【使用方法等】

1. 表面のはくり紙をはがし、粘着面を傷口に当てます。
2. 指に沿わせ粘着面を巻きつけます。
3. 残りのはくり紙をはがし、テープのまわりに浮きやシワができないように、貼りつけてください。
4. 支持フィルムがついていますので、最後に紫色部分をつまみ、残りの支持フィルムを剥がします。その後、全体をかるく押さえてテープをしっかりと密着してください。

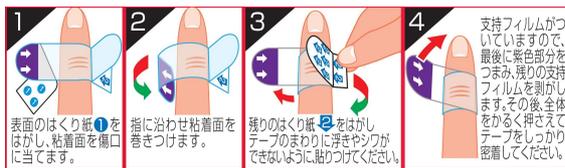

【使用上の注意】

- ・滅菌効果が損なわれますので、使用時に開封してください。
- ・包装が破損及び汚損している場合には、滅菌効果が損なわれますので、使用しないでください。
- ・傷口とそのまわりを清潔にし、水気をとってからご使用ください。水分があると貼りつきにくい場合があります。
- ・本品自体には治癒効果はございません。傷の被覆及び保護等にご使用ください。
- ・1日1～2回貼る場所を少しずらして貼り替えてください。
- ・しっかりと肌になじませながら、装着してください。
肌への粘着が不十分ですと、装着中に剥がれる恐れがあります。
- ・表面に支持フィルムがついていますので、必ず剥がしてご使用ください。
- ・肌の弱い方などが使用中に、かゆみ・かぶれなどの症状が現れた場合には、使用を中止して、医師又は薬剤師にご相談ください。

- ・ハンドクリームや軟膏と一緒に使用すると粘着性がおち、はがれやすくなりますので、おやめください。
- ・はがす際は周囲の皮膚を軽くおさえながら、ゆっくりはがしてください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・小児の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光を避け、清潔なところに保管してください。

2. 有効期間

- ・本品の使用期限は包装に記載してあります。

[自己認証（当社データ）によります]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

白十字株式会社 〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室）

TEL 0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）