

一般医療機器 医 04 整形用品 34864000 救急絆創膏

FCストップバン クロスケア

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

粘着テープ：ウレタン不織布、ポリウレタン、アクリル系粘着剤

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合等を目的とする絆創膏です。

【使用方法等】

1. 両端をミシン目に沿ってゆっくり切ります。（裏側のはくり紙を剥がす前に行います）
2. 裏側中央のはくり紙を剥がし、粘着面が傷口を覆うように貼ります。
3. 最初に切り離れたテープ部分のはくり紙を剥がしながら巻き付けます。
4. 反対側も同様に貼り、全体を軽く押さえてテープをしっかり密着させてください。

【使用上の注意】

- ・再度、滅菌しないでください。[品質及び安全性を保証できないため]
- ・滅菌効果が損なわれますので、使用時に開封してください。
- ・包装が破損及び汚染している場合には、滅菌効果が損なわれますので、使用しないでください。
- ・傷口とそのまわりを清潔にし、水気をとってからご使用ください。水分があると貼りつきにくい場合があります。
- ・本品自体には治癒効果はございません。傷の被覆及び保護等にご使用ください。
- ・1日1～2回貼る場所を少しずつらして貼り替えてください。[肌のかぶれ・損傷を防ぐため]
- ・装着時は、伸ばして装着しないでください。[肌のかぶれ・損傷を防ぐため]
- ・しっかりと肌になじませながら、装着してください。肌への粘着が不十分ですと、装着中に剥がれる恐れがあります。
- ・使用中に、かゆみ・かぶれなどの症状が現れた場合には、使用を中止して、医師又は薬剤師にご相談ください。

- ・ハンドクリームや軟膏と一緒に使用すると粘着性がおち、剥がれやすくなりますので、おやめください。
- ・剥がす際は周囲の皮膚を軽くおさえながら、ゆっくり剥がしてください。[肌のかぶれ・損傷を防ぐため]
- ・小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。
- ・本品は小売りでの開封販売はできません。[保健衛生上の危害が生じる可能性があるため]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・直射日光を避け、清潔なところに保管してください。

2. 有効期間

- ・本品の使用期限は包装に記載してあります。[自己認証（当社データ）によります]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

白十字株式会社 〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

<https://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室）

TEL 0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）