

機械器具 34 医療用刀  
管理医療機器 単回使用メス 35130002

# フェザーセーフシールドスカルペル

再使用禁止

### 【警告】


- 非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。  
[切傷、穿刺等のおそれがある。]

### 【禁忌・禁止】


- 再使用禁止。[感染症を引き起こすおそれがある。]
- 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

形状

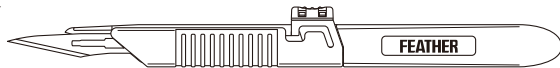


No.3ハンドルタイプ

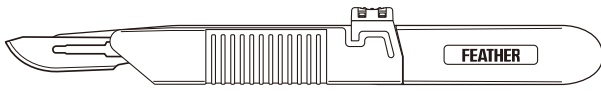

No.4ハンドルタイプ

主な刃部形状と品番

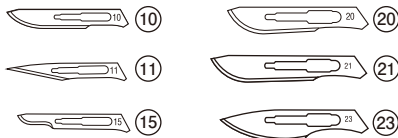

組成: 刃部/ステンレス鋼  
柄部/ABS樹脂  
安全カバー/ABS樹脂

原理: 本品は、各種形状の刃部を持つ外科手術用のメスである。ハンドル部に取り付けてある安全カバーにより刃先を保護し、取扱い時の安全性を高める。術者が刃先形状を有用に利用し、手術に使用する単回使用メスである。


### 【使用目的又は効果】

外科手術に使用すること及び切離並びに検査、研究用試料及び物体の切断に使用すること。


### 【使用方法等】

包装を開封して取り出し、安全カバーをスライドさせて使用してください。


1. 包装を開封して取り出す。

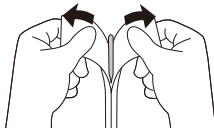

2. 使用時はプッシュボタン前部を押しながら、手前にスライドさせる。

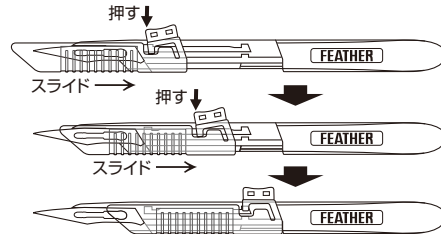

3. 使用後は、プッシュボタン前部を押しながら、安全カバーを前にスライドさせ、刃先を覆ってから廃棄する。

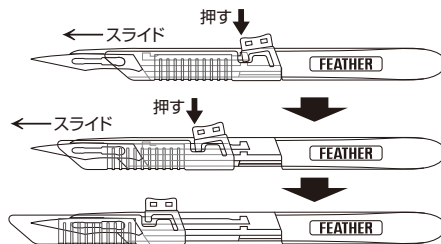

※柄部のスケールは目安程度にご使用ください。

### 【使用上の注意】

#### <重要な基本的注意>

- 軟骨・骨などの硬組織には使用しないこと。  
[刃先が破損するおそれがある。]
- 他の医療機器と一緒に個別包装のまま再滅菌をする場合はくお問い合わせ先>に確認すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

- 高温・多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。
- 使用期限は製造日より5年。(自己認証による)

例. ○○○○-○○ は使用期限○○○○年○○月を示す。

- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

**LOT 00 00 0000**

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売元>フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場  
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

<製造元>フェザー安全剃刀株式会社 本社  
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

<お問い合わせ先>フェザー安全剃刀株式会社 東京支店  
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917