

機械器具 12 理学療法用器具
一般医療機器 温熱用パック 37240010
TENTIAL・BAKUNE ウェア

【禁忌・禁止】


- 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常時は使用しないこと。
- 異常(かゆみ、かぶれなど)を感じたら、ご使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】**1. 形状、構造**

1. トップス



2. ボトムス

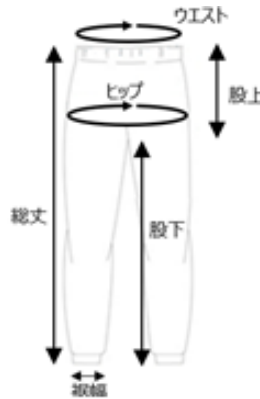

寸法 (cm)

トップス				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
S	60	47.5	52	78.5
M	63	49	54	81
L	66	50.5	56	83.5
XL	69	52	58	86

ボトムス						
サイズ	ウエスト	ヒップ	総丈	股上	股下	裾幅
S	69	98	95	24.5	70	13
M	75	102	98	25.5	72	14
L	81	106	101	26.5	74	15
XL	87	110	104	27.5	76	16

(単位：cm/交差；±10%)

2. 原理

本品は原材料繊維に高純度セラミックを定着させ、身体から放出される熱を吸収し放出する衣類型の医療機器である。

【使用目的又は効果】**【温熱治療効果】**

- 疲労軽減
- ストレス軽減
- 血行促進
- 筋肉のハリ、コリの軽減

【使用方法等】

本品は再使用可能である。

- 本品に破損がないことを確認する。
- 衣類として着用する。
- 日常生活時及び睡眠時のいずれでも着用可能である。
- 本品は再使用可能。
- 本品の効果には個人差があるため、20 日以上長期着用が望ましい。
- 睡眠時の着用は、発汗作用が高まる事から、十分な水分補給を行うこと。

【使用上の注意】

- 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- 異常(かゆみ、かぶれなど)を感じたら、ご使用を中止すること。
- 洗濯で色落ち、移染する場合があるので他の物と分けて洗濯すること。
- 着用や洗濯、摩擦により他の物に色移りや、プリントが剥がれる場合があるので注意すること。
- 長時間水に浸けたり、濡れたまま重ね置きすると、淡色部や他の物に色移りする場合があるので注意すること。
- 蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用すること。
- タンブラー乾燥の使用は、避けること。
- 長時間の摩擦や揉み作用で毛玉が出来やすいので、注意すること。
- 目立つ毛玉は、ハサミや毛玉取り器で取り除くこと。
- 湿気や日光(紫外線)の影響をお受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じる場合があるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- しばらく使用しない時は一度干してから、湿気のない場所で保管すること。

【包装】

1 枚/袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ファーストメディカル株式会社

製造業者：ファーストメディカル株式会社

〒166-0002 東京都渋谷区高円寺北 2-3-15 オフィスアイ 201

【問い合わせ先】

株式会社 TENTIAL

問い合わせ先電話番号：03-6455-2921

ご使用前に必ずこの文章をお読みください