



類別：機械器具 75 脱疾治療用器具

一般医療機器 脱疾治療用ストラップ JMDNコード：30883000


骨盤底筋サポートショーツ 整体ショーツ 凛 medi

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

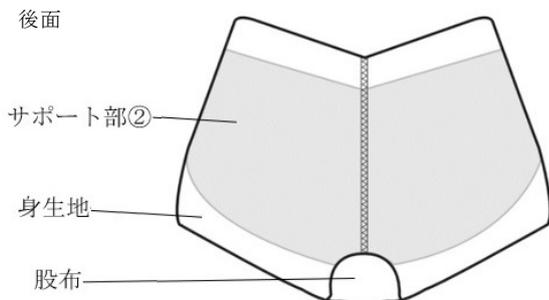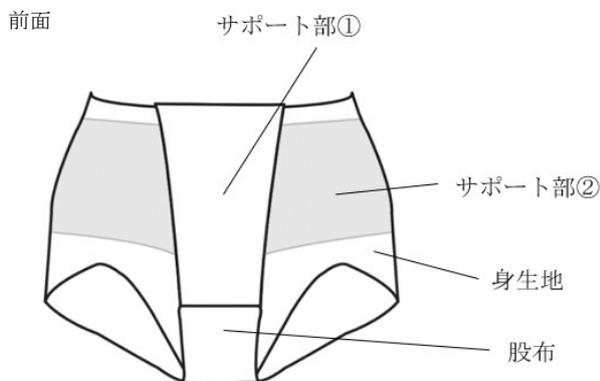

2. サイズ (寸法)

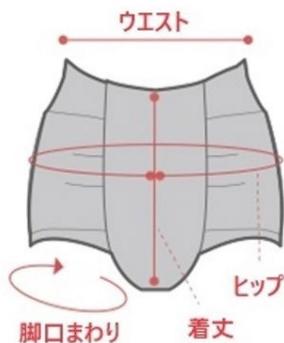

サイズ (ヒップサイズ)	平置き寸法 (ウエスト/ヒップ/着丈/脚口まわり)
S (82cm-90cm)	24.5cm/62.0cm/30.5cm/37.0cm
M (87cm-95cm)	26.0cm/64.0cm/32.0cm/38.0cm
L (92cm-100cm)	27.5cm/66.0cm/33.5cm/39.0cm
L L (97cm-105cm)	29.0cm/68.0cm/35.0cm/40.0cm
3 L (102cm-110cm)	30.5cm/70.0cm/36.5cm/41.0cm

3. 原理

サポート部①によって恥骨を持ち上げ、サポート部②で尾骨方向に締めることで骨盤を立て、骨盤底筋を引き締めることで、膀胱瘤により下垂した膀胱を持ち上げ、正常な位置に保持し、症状を改善・予防する。

4. 原材料

部分名称	素材
身生地	ナイロン・ポリウレタン
サポート部①②	ナイロン・ポリウレタン
股布	組成ポリエステル・アクリル

【使用目的、効能又は効果】

骨盤臓器脱の症状を有する患者が、下着として着用することにより、骨盤位置を矯正し、下垂した臓器を正常な位置に保持するためのものである。特に、下垂した膀胱を正常な位置に保持し、頻尿や尿もれを伴う膀胱瘤の症状を改善・予防する。

【操作方法又は使用方法等】

下着として着用します。臓器が脱出している場合には、体内に戻してから着用してください。

【使用上の注意】

- ・着圧機能のついた製品との併用は危険ですのでおやめください。
- ・お肌に合わない場合や、かぶれ・かゆみなどを感じた場合はご使用をおやめください。
- ・本来の目的以外でのご使用はおやめください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：直射日光を避け室内で保管してください。
 耐用期間：サポート部が伸びてしまうと製品寿命ですので買い替えが必要です。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ボディプラウト
 TEL：044-863-7686
 製造業者：株式会社ボディプラウト
 外国製造業者：Xiamen Yishangyi Garments Co.,Ltd
 Jiangxi YSY Technology Co.,Ltd.